



PACS nas Nuvens

Manual de Usuário



SOLUÇÕES EM IMAGINOLOGIA

Fundada em 2017, a **Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços** atua no segmento de tecnologia da informação radiológica e tem-se consolidada como uma empresa de alta tecnologia, aliando inovação tecnológica à radiologia médica. Atualmente, nossa empresa oferece as melhores soluções com o melhor custo benefício do mercado. Nosso foco é atender as necessidades de cada organização, adequando soluções tecnológicas aos objetivos de cada negócio.

A **Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços** possui ferramentas integrativas que oferecem soluções de gestão e diagnóstico radiológico de forma eficiente e eficaz capaz de suprir as expectativas dos nossos clientes.



Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços LTDA

Rua 22 431 Quadrah 10 Lote 24 Box C-78

Setor Oeste - Goiânia - Goiás

CNPJ: 46.857.972/0001-06

atendimento@lexuspacs.com.br

Telefone: (62) 99618-9034

Sumário

I	Acesso ao Sistema	
1	Acesso	9
1.1	Login	9
1.2	Página Principal	9
1.2.1	Menu Lateral	10
1.2.2	Cabeçalho	10
II	Lista de Estudos	
2	Lista de Estudos	15
2.1	Lista de Estudos	15
III	Usuários	
3	Usuários	21
3.1	Usuários	21
IV	Configurações	
4	Configurações	25
4.1	Configurações	25
4.2	Personalização do Layout	27

Índice **29**



Acesso ao Sistema

1	Acesso	9
1.1	Login	
1.2	Página Principal	

1. Acesso

1.1 Login

O sistema LexusPACS Server possui uma tela de login bem simples e direta, basta inserir o e-mail do usuário e a senha. Após a inserção dessas informações o usuário deverá clicar em **“Entrar”**.

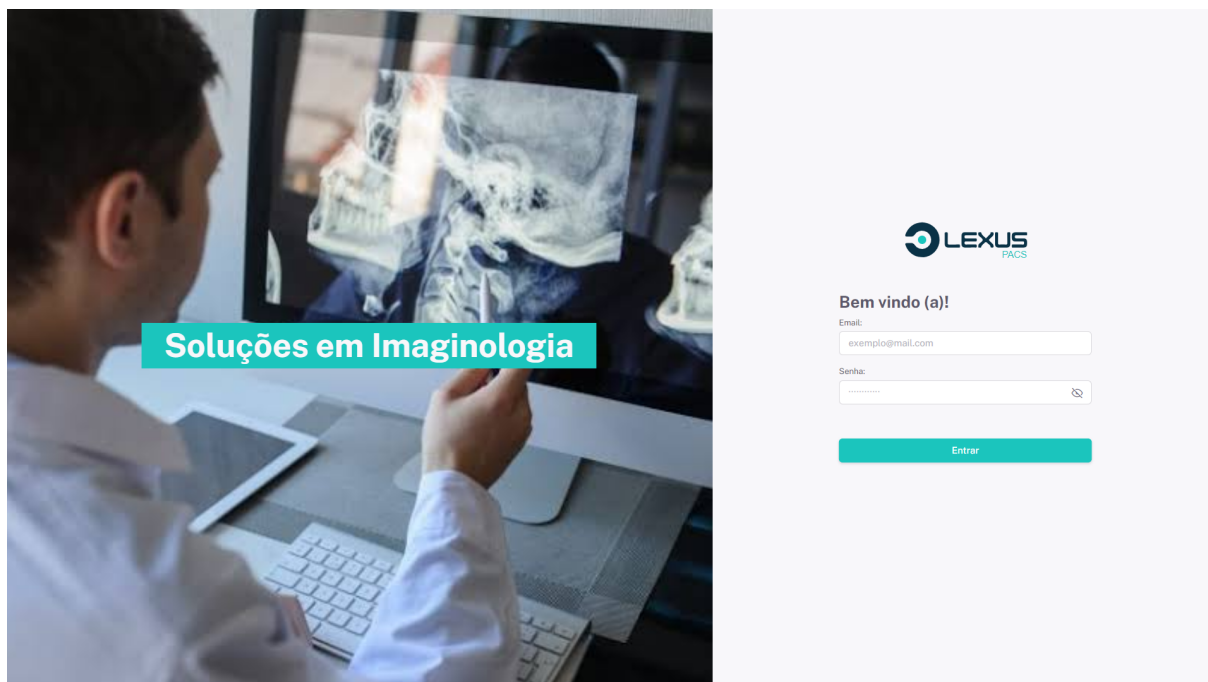


Figura 1.1: Tela de login do sistema LexusPACS Server.

1.2 Página Principal

Após realizar login no sistema LexusPacs Server, o usuário terá acesso à página inicial, onde vemos a listagem de estudos com as opções de filtragem, um menu na lateral e uma barra de cabeçalho na parte superior com uma foto do usuário que está logado no sistema.

PACIENTE	SEXO	NASCIMENTO	DATA DO ESTUDO	MODALIDADE	DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	IMAGENS	AÇÕES
CICLANO ALVES	F	16/07/1974	17/08/2023	CT	TC DO CRANIO	Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia	536	[ícone]
FULANA PEREIRA	F	05/08/1995	17/08/2023	CT	TC DE ABDOME TOTAL	Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia	753	[ícone]
teste rx de oliveira	F	07/12/1983	11/08/2023	CR	MEMBROS INFERIORES,BACIA	HUAPA	3	[ícone]
teste rx de fatima	M	22/10/1990	07/08/2023	CR	TORAX	HUAPA	1	[ícone]

Figura 1.2: Página inicial do sistema LexusPACS Server.

1.2.1 Menu Lateral

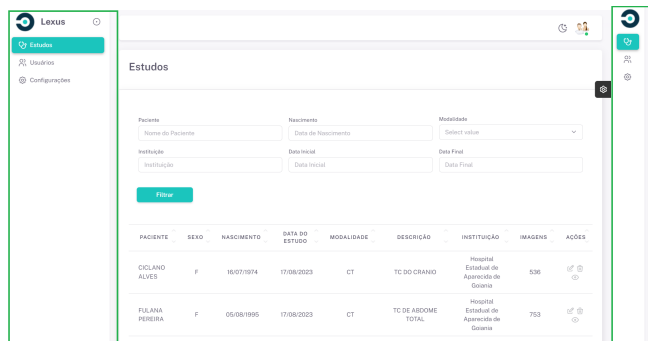


Figura 1.3: Menu Lateral.

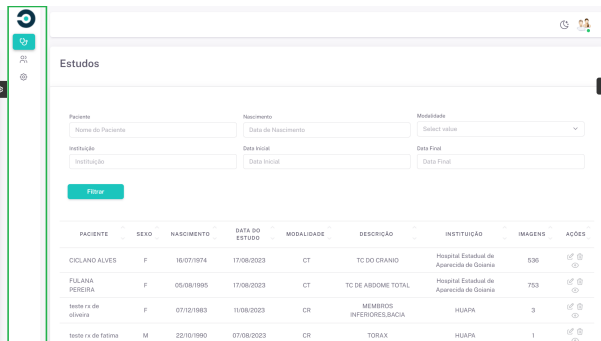


Figura 1.4: Menu Lateral (modo somente ícones).

O menu lateral (Figura 1.3) do LexusPACS Server possui 03 (três) botões de navegação para as páginas “**Estudos**”, “**Usuários**” e “**Configurações**”. Possui também a logo da LexusPACS Server que ao ser clicada leva para a página principal e um CheckBox no canto superior direito que alterna entre o menu completo ou somente ícones (Figura 1.4).

1.2.2 Cabeçalho

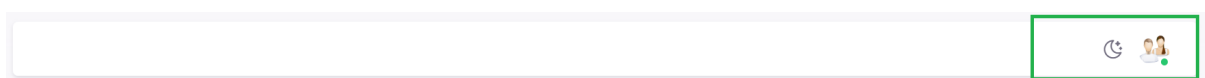


Figura 1.5: Cabeçalho do LexusPACS Server.

O cabeçalho (Figura 1.5) possui um indicador de usuário com foto e um botão que alterna entre os temas claro (**light mode**) e escuro (**dark mode**).


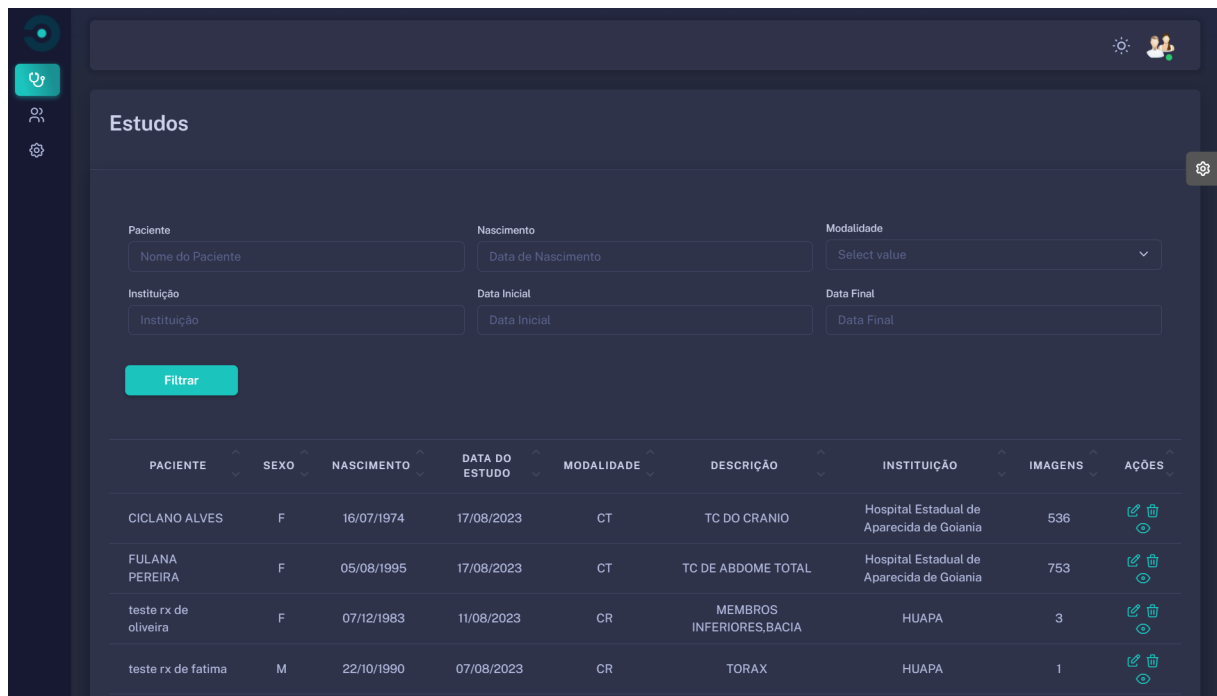


Figura 1.6: Tela principal da LexusPACS Server (tema escuro).

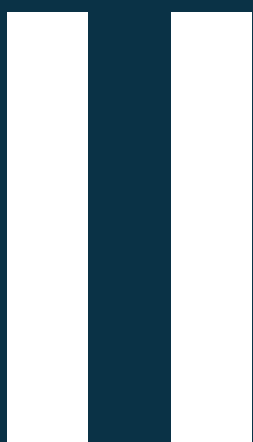

Lista de Estudos

2	Lista de Estudos	15
2.1	Lista de Estudos	

2. Lista de Estudos

2.1 Lista de Estudos

The screenshot displays the 'Estudos' (Studies) page in the LexusPACS Server. The interface includes a sidebar with navigation icons and a main content area. The 'Estudos' section features a filter form with the following fields:

- Paciente: Nome do Paciente
- Nascimento: Data de Nascimento
- Modalidade: Select value
- Instituição: Instituição
- Data Inicial: Data Inicial
- Data Final: Data Final

A 'Filtrar' (Filter) button is located below the filter form. Below the filter form is a table listing studies with the following columns:

PACIENTE	SEXO	NASCIMENTO	DATA DO ESTUDO	MODALIDADE	DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	IMAGENS	AÇÕES
CICLANO ALVES	F	16/07/1974	17/08/2023	CT	TC DO CRANIO	Hospital Estadual de Aparecida de Goiania	536	 
FULANA PEREIRA	F	05/08/1995	17/08/2023	CT	TC DE ABDOME TOTAL	Hospital Estadual de Aparecida de Goiania	753	 
teste rx de oliveira	F	07/12/1983	11/08/2023	CR	MEMBROS INFERIORES,BACIA	HUAPA	3	 
teste rx de fatima	M	22/10/1990	07/08/2023	CR	TORAX	HUAPA	1	 

Figura 2.1: LexusPACS Server - Filtragem de lista de estudos.

Na página inicial da LexusPACS Server, os usuários contam com um conjunto de opções de filtros. Os usuários poderão realizar uma busca por nome do paciente, data de nascimento, modalidade do exame, instituição que realizou o exame, data inicial e data final de realização do exame.

Após a seleção de um ou mais filtros o usuário poderá clicar no botão **Filtrar** para que a grid com a lista exames sejam atualizadas.

PACIENTE	SEXO	NASCIMENTO	DATA DO ESTUDO	MODALIDADE	DESCRIÇÃO	INSTITUIÇÃO	IMAGENS	AÇÕES
CICLANO ALVES	F	16/07/1974	17/08/2023	CT	TC DO CRANIO	Hospital Estadual de Aparecida de Goiania	536	[Edit] [Delete] [View]
FULANA PEREIRA	F	05/08/1995	17/08/2023	CT	TC DE ABDOME TOTAL	Hospital Estadual de Aparecida de Goiania	753	[Edit] [Delete] [View]
teste rx de oliveira	F	07/12/1983	11/08/2023	CR	MEMBROS INFERIORES,BACIA	HUAPA	3	[Edit] [Delete] [View]
teste rx de fatima	M	22/10/1990	07/08/2023	CR	TORAX	HUAPA	1	[Edit] [Delete] [View]

Figura 2.2: LexusPACS Server - lista de estudos.

A grid com a listagem de estudos conta com algumas ações, como por exemplo, botões para visualizar o exame, editar informações do exame e excluir o estudo. Nota-se que ao excluir o estudo, todas as imagens serão excluídas do servidor PACS. Essa opção pode ser utilizada para que seja realizado um novo exame ou o usuário poderá selecionar a ação de editar dados do exame caso alguma informação advinda do equipamento de radiologia apresente algum erro ou inconsistência nos dados do exame.

Figura 2.3: LexusPACS Server - Edição de estudos.

A área de edição de estudos que pode ser acessada pelo menu de ações, permite alterar o nome do

paciente, data de nascimento, sexo, modalidade e descrição. Clicando no botão salvar, as alterações serão aplicadas e clicando em cancelar, as alterações serão desfeitas.

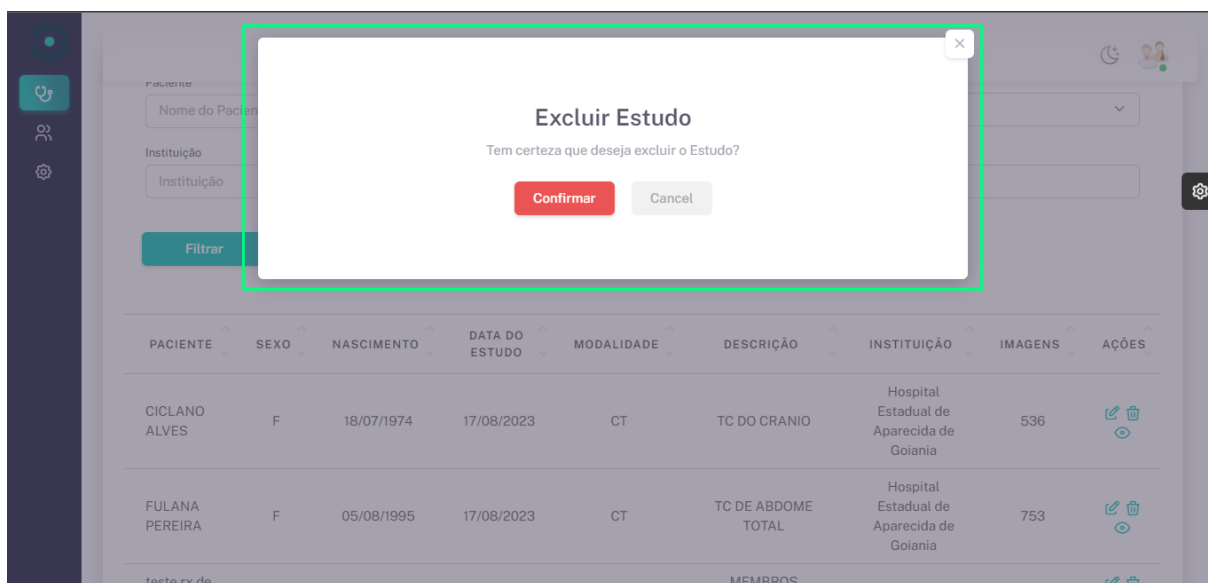


Figura 2.4: LexusPACS Server - Exclusão de estudos.

Ao clicar no botão de exclusão, o usuário será questionado se tem certeza que deseja fazer a exclusão. A exclusão será cancelada caso o usuário clique em “cancelar” ou no botão “X”. O estudo só será excluído se o usuário clicar no botão “confirmar” em vermelho.




Usuários

3	Usuários	21
3.1	Usuários	

3. Usuários

3.1 Usuários

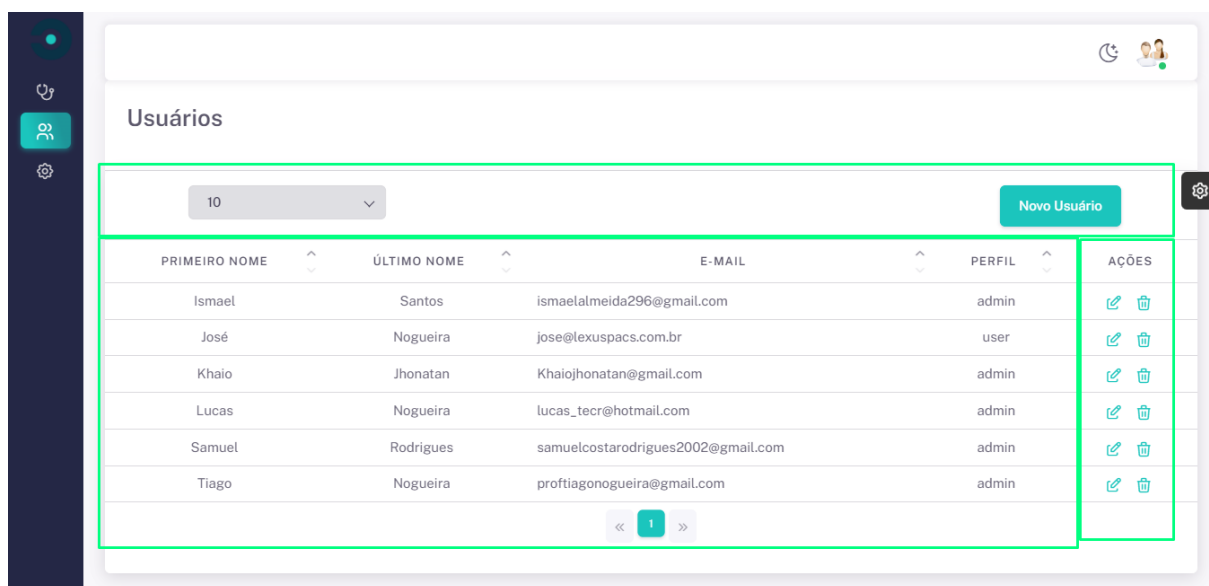

Usuários

10


Novo Usuário

PRIMEIRO NOME	ÚLTIMO NOME	E-MAIL	PERFIL	AÇÕES
Ismael	Santos	ismaelalmeida296@gmail.com	admin	 
José	Nogueira	jose@lexuspacs.com.br	user	 
Khaio	Jhonatan	Khaiojhonatan@gmail.com	admin	 
Lucas	Nogueira	lucas_tecr@hotmail.com	admin	 
Samuel	Rodrigues	samuelcostarodrigues2002@gmail.com	admin	 
Tiago	Nogueira	proftiagonogueira@gmail.com	admin	 

<< 1 >>

Figura 3.1: LexusPACS Server - Usuários.

Na página de usuários, ao topo da lista de usuarios temos: à esquerda um seletor para determinar quantos usuários serão mostrados por página e um botão à direita para adicionar um novo usuário. Em seguida temos a listagem de usuários com as principais informações dos mesmos, com os botões de ação, à direita, com as funções de editar e excluir usuários.

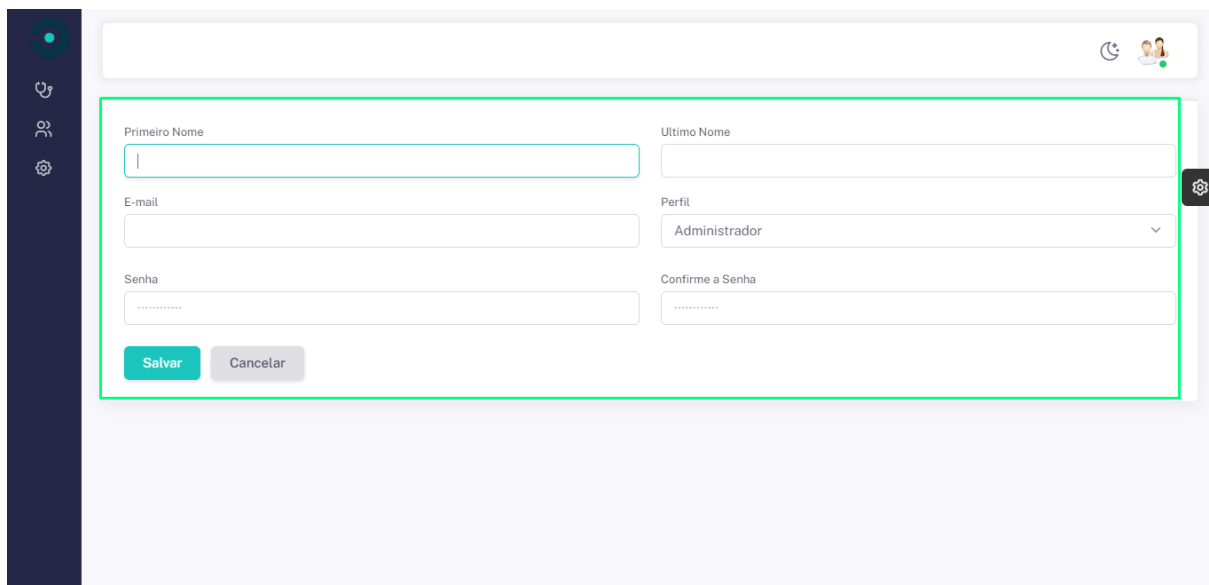

The screenshot displays the 'Add/Edit User' form in the LexusPACS Server interface. The form is enclosed in a green border and contains the following fields:

- Primeiro Nome (First Name): A text input field.
- Ultimo Nome (Last Name): A text input field.
- E-mail: A text input field.
- Perfil (Profile): A dropdown menu with 'Administrador' selected.
- Senha (Password): A password input field.
- Confirme a Senha (Confirm Password): A password input field.

At the bottom of the form are two buttons: 'Salvar' (Save) in green and 'Cancelar' (Cancel) in gray. The interface also features a dark sidebar on the left with navigation icons and a top header with a search bar and user profile icon.

Figura 3.2: LexusPACS Server - Edição/adção usuários.

As telas de adção e edição de usuarios são visualmente identicas, com diferenas apenas no funcionamento. Na criação de usuário é preciso adicionar o primeiro e último nome do usuario, e-mail, perfil e senha com confirmação. Clicando em salvar o usuario será criado. Na tela de edição, os dados vem preenchidos com excessão da senha, clicando em salver as alteraçoes são apricadas ao usuário selecionado.

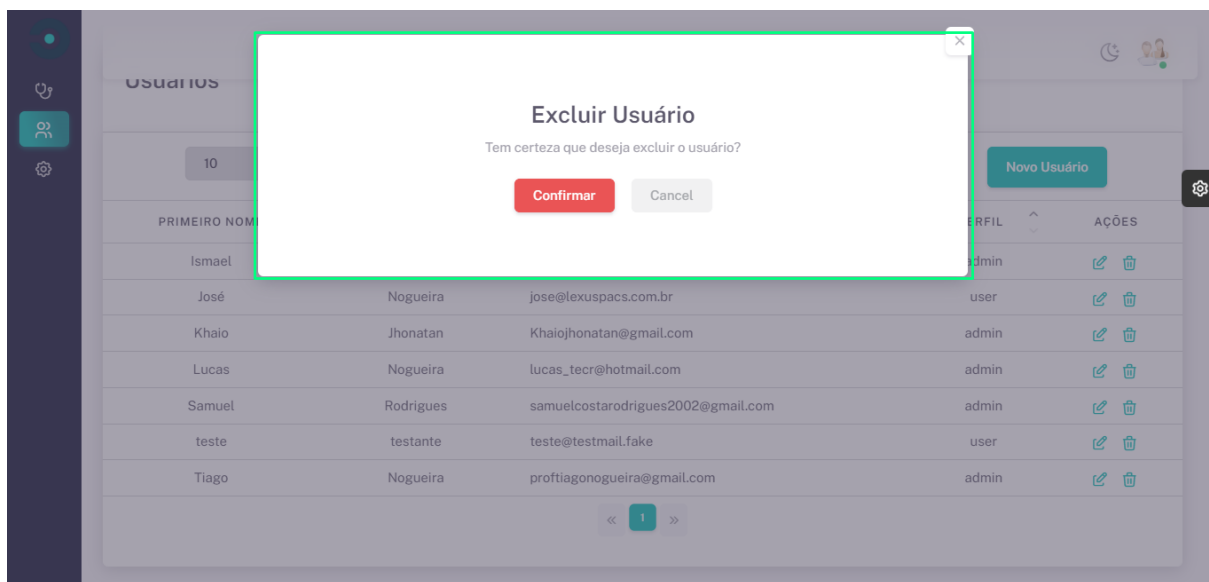


Figura 3.3: LexusPACS Server - Exclusão de usuarios.

Ao clicar no botão de exclusão o usuário será questionado se tem certeza que deseja fazer a exclusão. A exclusão será cancelada caso o usuario clique em “cancel” ou no botão “X”. O registro do usuário será excluido se clicar no botão “confirmar” em vermelho.

IV

Configurações

4	Configurações	25
4.1	Configurações	
4.2	Personalização do Layout	

4. Configurações

4.1 Configurações

The screenshot displays the 'Lexus' web application's configuration page. The left sidebar shows the 'Configurações' menu item selected. The main content area is divided into three sections: 'Servidor PACS', 'Roteador PACS', and 'Backup'. The 'Servidor PACS' section is highlighted with a green border and contains the following configuration fields:

- AE Title: LEXUS_SERVER
- IP do Servidor: 191.101.18.41
- Porta: 11112

Below these fields are three buttons: 'Salvar' (teal), 'Iniciar' (green), and 'Parar' (red). The 'Roteador PACS' section contains identical fields and two buttons: 'Salvar' (teal) and 'Testar' (orange). The 'Backup' section at the bottom has a label 'Insira o caminho total para a pasta de backup' and an empty text input field.

Figura 4.1: LexusPACS Server - PACS Server config.

Na tela de configurações, há três painéis: o primeiro é o “Servidor PACS” que serve para configurar o servidor PACS local, informando o apelido do servidor (AE Title), o IP do servidor local e a porta.

The screenshot displays the 'Lexus' application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Estudos', 'Usuários', and 'Configurações' (highlighted in teal). The main content area is divided into three panels. The top-left panel, titled 'Servidor PACS', contains input fields for 'AE Title' (filled with 'LEXUS_SERVER'), 'IP do Servidor' (filled with '191.101.18.41'), and 'Porta' (filled with '11112'). Below these are three buttons: 'Salvar' (teal), 'Iniciar' (green), and 'Parar' (red). The top-right panel, titled 'Roteador PACS', is highlighted with a green border. It contains similar input fields for 'AE Title' ('LEXUS_SERVER'), 'IP do Servidor' ('191.101.18.41'), and 'Porta' ('11112'). Below these are 'Salvar' (teal) and 'Testar' (orange) buttons. The bottom panel, titled 'Backup', has a text input field for the backup path and a 'Salvar' button. The top right of the interface shows a clock icon and a user profile icon.

Figura 4.2: LexusPACS Server - PACS Router config.

O segundo é o “Roteador PACS”, utilizado para fazer a conexão com o servidor nas nuvens (roteador). Neste sentido, basta informar o apelido do servidor PACS (AE Title), o endereço IP do servidor em nuvem e a porta.

This screenshot shows the same 'Lexus' application interface, but with the 'Backup' configuration panel highlighted by a green border. The 'Servidor PACS' and 'Roteador PACS' panels are visible at the top, with the 'Porta' field in the 'Servidor PACS' panel containing the value '11112'. The 'Backup' panel includes a text input field for the backup path, a dropdown menu for selecting the day of the week (currently set to 'Segunda'), and a text input field for the backup time (set to '12:00'). A 'Salvar' button is located at the bottom of this panel. The sidebar and top navigation elements remain consistent with the previous screenshot.

Figura 4.3: LexusPACS Server - Backup config.

O terceiro é a configuração de backup local, bastando inserir o caminho da pasta onde será feito o backup, o dia da semana e hora em que backup será realizado.

4.2 Personalização do Layout

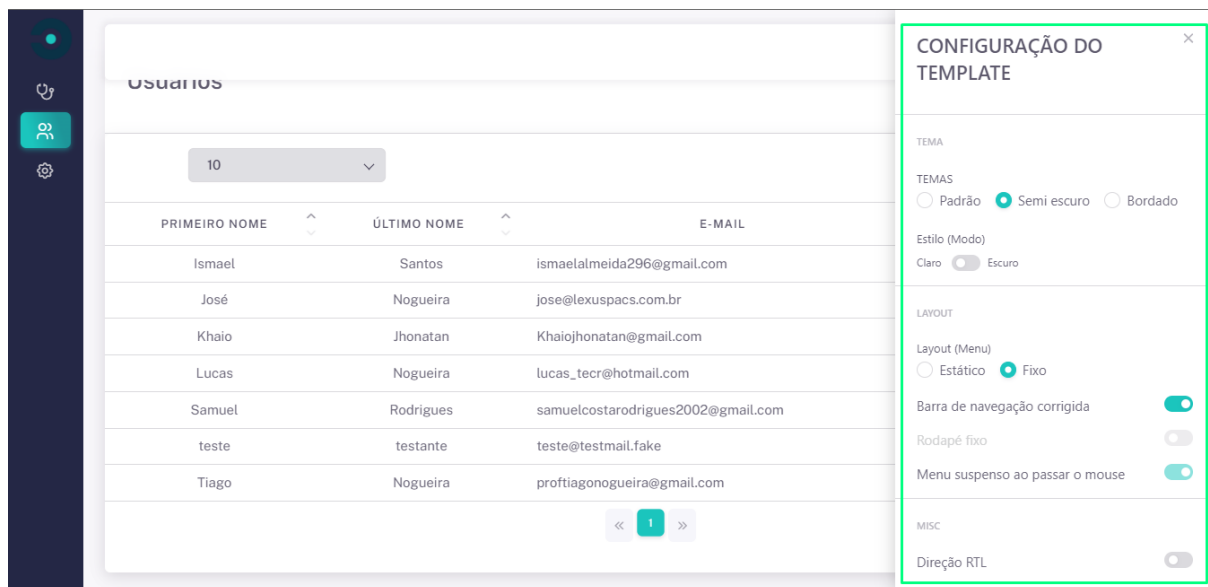


Figura 4.4: LexusPACS Server - Personalização de Layout.

Clicando na engrenagem ao lado direito da pagina, é possível acessar o menu de personalização de layout, alternando entre os temas escuro e claro, alternando o menu lateral entre fixo e estatico, ativando o modo direita pra esquerda (RTL).

Índice

L

Login 9

P

Pagina Principal 9



Portal de Laudos

Manual de Usuário





SOLUÇÕES EM IMAGINOLOGIA

Fundada em 2017, a **Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços** atua no segmento de tecnologia da informação radiológica e tem-se consolidada como uma empresa de alta tecnologia, aliando inovação tecnológica à radiologia médica. Atualmente, nossa empresa oferece as melhores soluções com o melhor custo benefício do mercado. Nosso foco é atender as necessidades de cada organização, adequando soluções tecnológicas aos objetivos de cada negócio.

A **Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços** possui ferramentas integrativas que oferecem soluções de gestão e diagnóstico radiológico de forma eficiente e eficaz capaz de suprir as expectativas dos nossos clientes.



Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços LTDA

Rua 22 431 Quadrah 10 Lote 24 Box C-78

Setor Oeste - Goiânia - Goiás

CNPJ: 46.857.972/0001-06

atendimento@lexuspacs.com.br

Telefone: (62) 99618-9034

Sumário

I	Login no Sistema	
1	Login no Sistema	9
1.1	Autenticação de Usuário	9
II	Lista de Estudos	
2	Lista de Estudos	13
2.1	Página Principal	13
2.2	Estudos	13
2.3	Ações	14
III	Relatórios de Laudos	
3	Relatórios de Laudos	29
3.1	Relatórios	29
IV	Configurações	
4	Configurações	35
4.1	Configurações de Usuários	35
4.2	Configurações de Máscaras	40
4.3	Configurações de Empresas	44

4.4	Configurações de Precificação	47
4.5	Configurações de Temporização	48

V	Administração
---	---------------

5	Administração	53
5.1	Atribuição de Perfis de Usuários	53
	Índice	55




Login no Sistema

1	Login no Sistema	9
1.1	Autenticação de Usuário	

1. Login no Sistema

1.1 Autenticação de Usuário

Para acessar a página de login da **LexusPACS**, basta inserir no endereço de pesquisa o seguinte link:
<https://portal.lexuspacs.com.br/accounts/login/>.

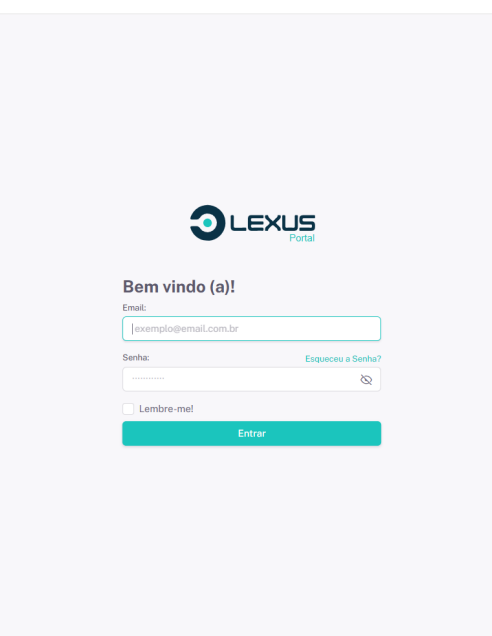

Após isso insira no campo de “E-mail” o e-mail cadastrado no sistema e sua senha padrão que deverá ser trocada logo após o seu primeiro acesso.



Bem vindo (a)!

Email:
exemplo@email.com.br

Senha:
Esqueceu a Senha?

☐ Lembre-me!

Entrar

Caso o usuário esqueça a senha, basta clicar no link “Esqueceu a senha” e inserir o e-mail logo em seguida.




LEXUS
Portal

Esqueci a Senha!

Email:
exemplo@email.com.br

Enviar Link

[< Voltar](#)

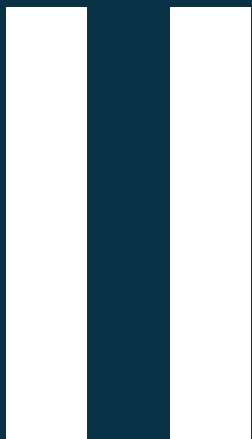

Lista de Estudos

2	Lista de Estudos	13
2.1	Página Principal	
2.2	Estudos	
2.3	Ações	

2. Lista de Estudos

2.1 Página Principal

Após fazer o login, o sistema redireciona o usuário para a página principal. Na página principal, no menu lateral esquerdo podemos encontrar as opções de “Estudos”, “Relatórios”, “Configurações” e “Administração”.

LEXUS Portal

Estudos

Relatórios

Configurações

Administração

Estudos

10

+ Adicionar

Paciente: Paciente

Nascimento: DD/MM/AAAA

Modalidade: Todas

Prioridade: Todas

Status: Todos

Instituição: Todas

Data Inicial: DD/MM/AAAA

Data Final: DD/MM/AAAA

Filtrar

PACIENTE	DATA	TEMPO	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	STATUS	AÇÕES
NATÁLIA SOUZA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104881h	Mammography	Urgente	Liberado	
JOÃO DA SILVA NETO 16/03/1966 (M)(XA)(6)	31/12/2011 11:30	104888h	Coronary 15 frs	Emergência	Liberado	

2.2 Estudos

Para pesquisar um estudo, basta inserir as informações necessárias nos campos e ir até a opção de “Filtrar”.

Estudos

10 ▼ + Adicionar

Paciente:

Modalidade:

Status:

Data Inicial:

Nascimento:

Prioridade:

Instituição:

Data Final:

Filtrar

Para adicionar um estudo, localize na parte superior direita do campo a palavra “Adicionar”, após isso clique com o botão esquerdo do mouse. Após o clique o sistema irá redirecionar o usuário para a tela de cadastro de estudo.

Cadastro de Estudo

UID do Estudo:

ID do Paciente:

Paciente:

Sexo:

Nascimento:

Data do Exame:

Modalidade:

Instituição:

Quantidade de Imagens:

Descrição:

Salvar Cancelar

Para adicionar, basta acrescentar as informações solicitadas no campo e clicar em “Salvar”.

2.3 Ações

Dentro do campo de “Ações” de estudos temos as opções de: “Visualizar Laudo”, “Pendências/Relaudar”, “Anamense”, “Pedido Médico”, “Áudio”, “Protocolo”, “Visualizar Laudo”, “Prioridade”, “DICOM”, “Download”, “Editar” e “Clonar”.

	NATÁLIA SOUZA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104883h	Mammography	Urgente	Liberado 	       
	JOÃO DA SILVA NETO 16/08/1966 (M)(XA)(6)	31/12/2011 11:30	104889h	Coronary 15 frs	Emergência	Liberado 	       
	JOÃO MANUEL DA SILVA 16/08/1066 (M)(US)(1)	31/12/2011 09:50	104891h	Cine-Loop	Não Urgente	Liberado 	       
	BRUNA DA SILVA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104883h	Mammography	Não Urgente	Liberado 	       
	BRUNA DA SILVA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104883h	Mammography	Emergência	Liberado 	       
	NATÁLIA SOUZA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104883h	Mammography	Não Urgente	Liberado 	       
	BRUNA DA SILVA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104883h	Mammography	Não Urgente	Liberado 	       

Laudar Estudo

PACIENTE	DATA	TEMPO	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	STATUS	AÇÕES
	JOÃO SILVA NETO 16/08/1966 (M)(XA)(6)	31/12/2011 11:30	104988h	Coronary 15 frs	Não Urgente	A Laudar        

Para laudar um estudo, basta localizar na coluna de ações o ícone de prancheta e observe se o status do estudo está em “A Laudar”. Após clicar com o botão esquerdo do mouse o sistema redireciona o usuário para a tela principal de “Emissão de laudos”.

Emissão de Laudo

UID do Estudo:
1.3.46.670589.28.26540798619720070924033036072734

Paciente:
João Silva Neto

Sexo:
M

Nascimento:
16 de Agosto de 1966

Data do Exame:
31 de Dezembro de 2011

Modalidade:
XA

Instituição:
Perennity

Descrição:
Coronary 15 frs

Máscara de Laudo

Pesquisar...

Máscara - 14

Nome da Máscara:

DENSITOMETRIA ÓSSEA

Após isso, o usuário precisa selecionar a máscara do exame. Oferecemos mais de trezentas máscaras

de laudos pré-cadastradas para que o médico possa ter uma variedade de máscaras disponíveis.

Search: Pesquisar...

Máscara - 14
Nome da Máscara: DENSITOMETRIA ÓSSEA
Categoria do Exame: DO
Expandir **Selecionar**

Máscara - 15
Nome da Máscara: RX DE TÓRAX
Categoria do Exame: CR
Expandir **Selecionar**

Máscara - 16
Nome da Máscara: RX DE ARCOS COSTAIS

Nesse campo há duas ações: “Expandir” e “Selecionar”. Para ver as informações da máscara clique com o botão esquerdo do mouse em “Expandir”. Para confirmar a máscara, clique em “Selecionar”.

Laudário

Prioridade do Resultado:
☐ Emergência ☐ Muito Urgente ☐ Urgente ☐ Pouco Urgente ☒ Não Urgente

Descrição:

Sans Serif Normal B I U x¹ x₂ H₁ H₂

DENSITOMETRIA ÓSSEA

Exame realizado por técnica de absorção de dois feixes de baixa energia emitidos por raios-X (DXA). Foram examinados a coluna lombar (PA) e o fêmur direito.

Resultados:

BMD (g/cm³):

- Coluna lombar L1-L4 T-Score (valor);
- Z-Score (valor);
- Colo femoral direito T-Score (valor);
- Z-Score (valor);
- Fêmur total direito T-Score (valor);
- Z-Score (valor);

Após selecionar a máscara, o usuário poderá definir a prioridade do resultado, assim como alterar a descrição.

The screenshot shows a report editor interface. At the bottom left, there is a red rectangular button labeled 'Salvar' (Save). To its right is a grey button labeled 'Cancelar' (Cancel). The main area of the editor contains text about bone densitometry, including T-Score ranges and references to ISCD and SBDens.org.br. The interface includes a sidebar on the left with icons for home, document, settings, and user, and a sidebar on the right with icons for settings, add, view, and share. A footer at the bottom left reads '© 2023, criado por LexusPACS.' and a chat icon is at the bottom right.

Após fazer as edições necessárias, vá em “Salvar”. O sistema irá emitir um alerta sobre a liberação do laudo.

The modal dialog has a white background and a grey border. It contains the text 'Deseja Liberar o Laudo?' in bold, followed by 'Liberar o Laudo irá IMPEDIR que ele possa ser editado novamente!'. At the bottom, there are three buttons: a red 'Liberar' button, a green 'Não Liberar' button, and a grey 'Cancelar' button.

Visualizar Laudo

PACIENTE	DATA	TEMPO	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	STATUS	AÇÕES
 NATÁLIA SOUZA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104884h	Mammography	Urgente	Liberado	      

Para visualizar o laudo do paciente, basta localizar na parte direita no campo de ações o ícone de PDF, após localizar, clique com o botão esquerdo do mouse, o sistema irá abrir na mesma página o PDF com as opções de “Salvar”, “Imprimir” e “Cancelar”.

Laudo (Estudo ID: 506)

506

1 / 2 | 90% | + | -

HOSPITAL:
CNPJ: 25.252.222/0002-22
AV DIAMANTES ESQ COM MUCURI, S/N QD 2A
ST CONDE DOS ARCOS - Bom Jesus da Lapa - Goiás
(00) 00000 0000
Código Validador: None

MAMMOGRAPHY (MG)

Nome: Natália Souza Rodrigues
Sexo: Feminino
Data de Nascimento: 17/06/1971 (52) anos
Data do Exame: 31/12/2011

DENSITOMETRIA ÓSSEA

Exame realizado por técnica de absorção de dois feixes de baixa energia emitidos por raios-X (DXA). Foram examinados a coluna lombar (PA) e o fêmur direito.

Resultados:

BMD (g/cm³):

- Coluna lombar L1-L4 T-Score (valor);
- Z-Score (valor);
- Colo femoral direito T-Score (valor);
- Z-Score (valor);
- Fêmur total direito T-Score (valor);
- Z-Score (valor);

Salvar Imprimir Cancelar

Pendênciar/Relaudar

PACIENTE	DATA	TEMPO	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	STATUS	AÇÕES
NATÁLIA SOUZA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104884h	Mammography	Urgente	Liberado	

Para alterar o status do laudo ou resolver algumas pendências, basta localizar na coluna de ações o ícone de chat ou no segundo botão. Ao clicar irá abrir no canto esquerdo da aplicação um menu lateral. Neste menu podemos trocar o status do laudo em “Pendenciar”, “A laudar” e “Relaudar”.

Status do Estudo

Status:

☐ Pendenciar
 ☒ A Laudar
 ☐ Relaudar

Justificativa:

Salvar Cancelar

Mensagens:

tiago (Administrador) - A Laudar:

Logo abaixo, o usuário poderá colocar a justificativa do porquê da alteração do laudo.

Anamnese

PACIENTE	DATA	TEMPO	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	STATUS	AÇÕES
 NATÁLIA SOUZA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104900h	Mammography	Urgente	Liberado	       

Para realizar a anamnese com o paciente, localize na coluna de ações o ícone de “+” e clique com o botão esquerdo do mouse. Após clicar, na mesma página irá abrir o formulário para a inserção das informações.

Anamnese

Informações Gerais

Hipótese de Diagnóstico:

Tem marcapasso Cardíaco?
☒

Tem Stents, válvula cardíaca artificial?
☒

Teve algum metal removido dos olhos?
☒

Alguma vez já foi ferido por uma arma de fogo?
☒

Tem alergia a algum medicamento?
☐

Tem insuficiência renal?
☐

Já realizou exame com contraste?
☐

História Clínica:

Tem Clips de Aneurisma?
☒

Membro artificial/placa metálica?
☒

Algum implante médico (Metálico ou outro)?
☒

Tem alergia ao meio de contraste?
☒

Já fez alguma cirurgia?
☒

Qual?

Tem alguma doença?
☒

Qual?

Realizou jejum recomendado?
☒

Salvar

Cx

Pedido Médico

PACIENTE	DATA	TEMPO	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	STATUS	AÇÕES
 NATÁLIA SOUZA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104900h	Mammography	Urgente	Liberado	       

Para anexar um pedido médico localize na coluna de ações o ícone de clipe e clique com o botão esquerdo do mouse. Após clicar irá abrir no canto esquerdo da aplicação um menu lateral, no menu podemos verificar os pedidos já anexados ou anexar mais pedidos com a descrição do mesmo.

Pedido Médico

Pedidos médico já anexados:

Anexar Documento:

Escolher arquivo

Nenhum a...o escolhido

Descrição do Arquivo:


Salvar

Cancel


Áudio

PACIENTE	DATA	TEMPO	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE	STATUS	AÇÕES
 NATÁLIA SOUZA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104900h	Mammography	Urgente	Liberado	      

Para inserir um áudio ou ouvir a gravação de áudios anteriores basta localizar no grupo de ações o ícone de microfone e clicar com o botão esquerdo do mouse. Após clicar com o mouse, irá abrir no canto esquerdo da aplicação um menu contendo os áudios gravados, a possibilidade de gravar e a opção de inserir uma descrição da gravação.

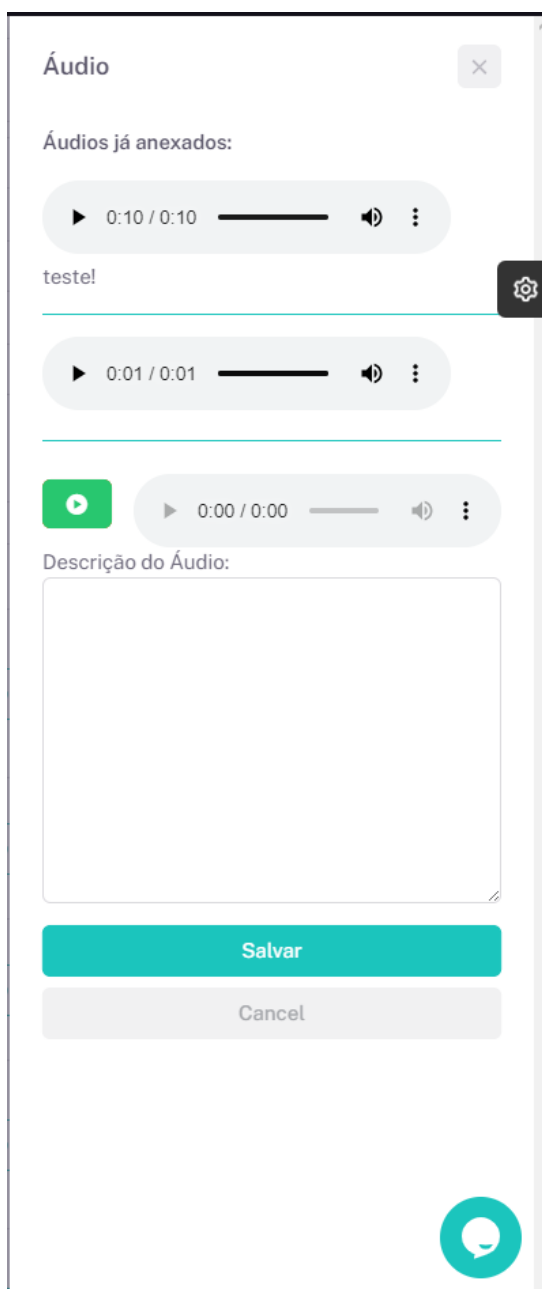

Protocolo

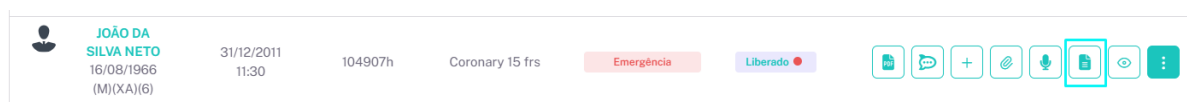

Para visualizar o protocolo do paciente, basta localizar na coluna de ações o ícone de página e clicar com o botão esquerdo do mouse. Após clicar com o mouse, o sistema irá abrir uma página contendo os dados do paciente como o tipo de exame, código de acesso, data de nascimento e link.

Protocolo (Estudo ID: 507)

507

1 / 1 100% +

HOSPITAL

CNPJ: 25.252.222/222-22

AV DIAMANTES 550 COM MAJOUR, S/N QD 2A

ST CONDE DOS ARCOIS - Bom Jesus da Lapa - Goiás

(00) 00000 0000

Token de Acesso: 886c

PROTÓCOLO DE EXAME

Nome: João da Silva Neto

Data de Nascimento: 16/08/1966

Sexo: Masculino

Data do Exame: 31/12/2011

CORONARY 15 FRS (XA)

Prezado (a) João da Silva Neto, seu exame estará disponível a partir de 31/12/2011 às 13:30h.

Link: http://portal.lexuspics.com.br/accounts/login_resultado/

Token de Acesso: 886c

Nascimento: 16/08/1966

Bom Jesus da Lapa-GO, 31 de Dezembro de 2011

Salvar

Imprimir

Cancelar

Visualizar Estudo

JOÃO DA SILVA NETO
16/08/1966
(M)(XA)(6)

31/12/2011
11:30


104907h

Coronary 15 frs

Emergência

Liberado

Para visualizar o estudo do paciente, basta localizar na coluna de ações o ícone de visão e clicar com o botão esquerdo do mouse. Após clicar com o mouse, o sistema irá abrir em outra página o nosso visualizador de imagens “DICOM”.

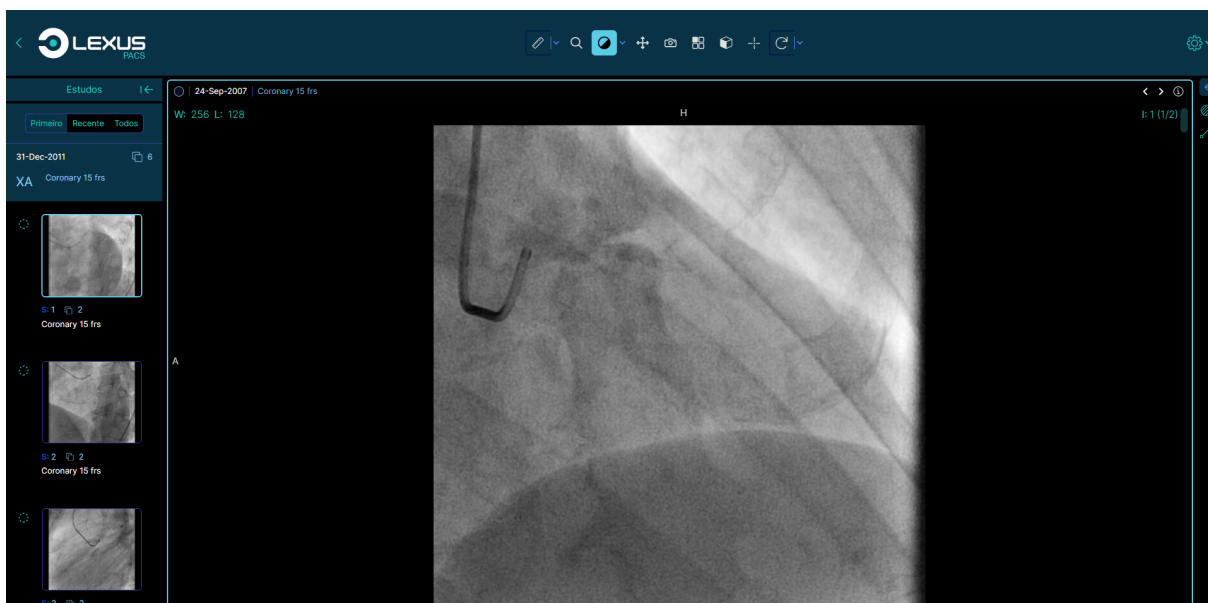

Prioridade de Estudo

 JOÃO DA SILVA NETO 16/08/1966 (M)(XA)(6)	31/12/2011 11:30	104913h	Coronary 15 frs	Emergência	Liberado	      
 JOÃO MANUEL DA SILVA 16/08/1066 (M)(US)(1)	31/12/2011 09:50	104914h	Cine-Loop	Não Urgente	Liberado	      
 BRUNA DA SILVA RODRIGUES	31/12/2011 18:14	104906h	Mammography	Não Urgente	Liberado	      

Para alterar a prioridade do estudo, basta localizar na coluna de ações a opção com três pontos. Após localizar e clicar com o botão esquerdo irá abrir um pequeno menu, após isso clique em “Prioridade”.

Prioridade do Estudo

Selecione a Prioridade

☐ Desejo alterar a prioridade do estudo!

Salvar

Cancelar

Ao clicar irá abrir uma janela na própria aplicação. Nessa janela podemos alterar a prioridade de estudo e fazer a confirmação da mesma.

Prioridade do Estudo

Urgente

☒ Desejo alterar a prioridade do estudo!

Salvar


Cancelar

Visualizador de Imagens (DICOM)

 JOÃO MANUEL DA SILVA 16/08/1066 (M)(US)(1)	31/12/2011 09:50	104914h	Cine-Loop	Não Urgente	Liberado	      
 BRUNA DA SILVA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104906h	Mammography	Não Urgente	Liberado	      
 BRUNA DA SILVA						      

Para visualizar o estudo com as imagens médicas, basta localizar na coluna de ações a opção com três

pontos. Após clicar em “DICOM” o sistema irá abrir em outra página o nosso visualizador de imagens.

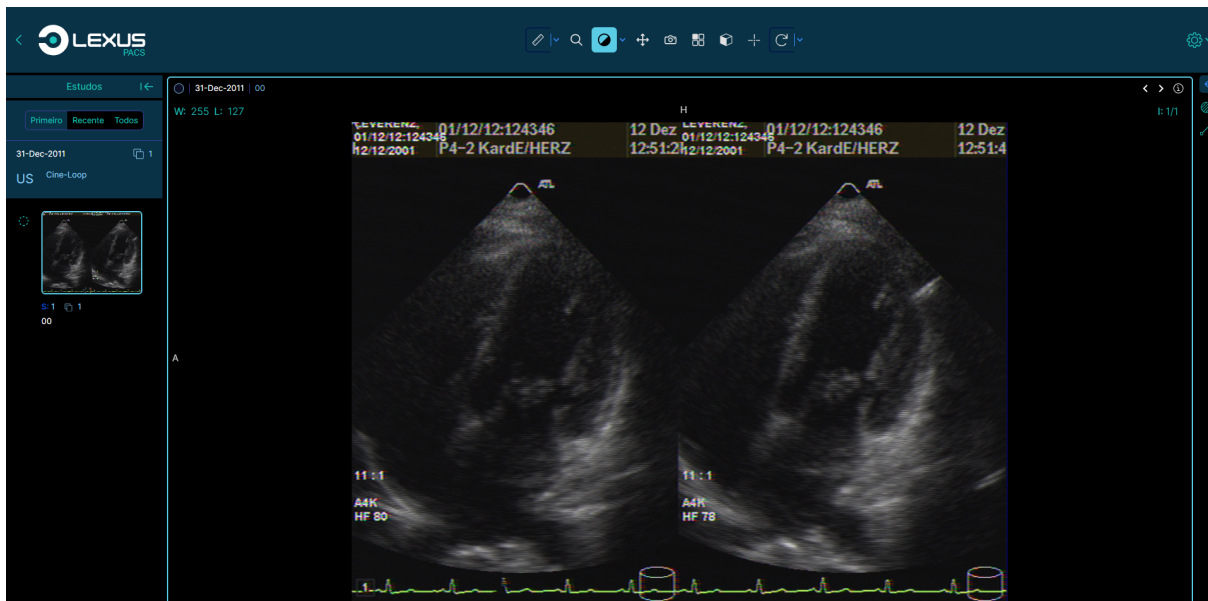

Download

	JOÃO DA SILVA NETO 16/08/1966 (M)(XA)(6)	31/12/2011 11:30	104913h	Coronary 15 frs	Emergência	Liberado ●						
	JOÃO MANUEL DA SILVA 16/08/1066 (M)(US)(1)	31/12/2011 09:50	104914h	Cine-Loop	Não Urgente	Liberado ●						
	BRUNA DA SILVA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104906h	Mammography	Não Urgente	Liberado ●						

Para fazer o download dos resultados, basta localizar na coluna de ações a opção com três pontos. Após clicar em “Download” automaticamente o sistema irá baixar para a máquina do usuário as imagens dos exames médicos.

Editar

	JOÃO MANUEL DA SILVA 16/08/1066 (M)(US)(1)	31/12/2011 09:50	104915h	Cine-Loop	Não Urgente	Liberado ●						
	BRUNA DA SILVA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104906h	Mammography	Não Urgente	Liberado ●						
	BRUNA DA SILVA 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011										

Para editar o estudo do paciente basta localizar na coluna de ações a opção com três pontos e clicar em “Editar”. Após clicar em “Editar”, o sistema irá direcionar para a página de alteração de dados do estudo.



Editar Estudo

Paciente:

Sexo:

Nascimento:

Modalidade:

Descrição:

Cine-Loop

Clonar

	JOÃO MANUEL DA SILVA 16/08/1066 (M)(US)(1)	31/12/2011 09:50	104915h	Cine-Loop	Não Urgente	Liberado 	      
	BRUNA DA SILVA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011 18:14	104907h	Mammography	Não Urgente	Liberado 	      
	BRUNA DA SILVA 31/12/2011						      

Para clonar o estudo do paciente basta localizar no grupo de ações a opção com três pontos e clicar em “Clonar”. Após clicar em “Clonar”, o sistema irá apresentar a confirmação de clonagem do estudo.

Confirma a clonagem do Estudo?
O estudo será clonado com todas as informações e dados do estudo original!

☒ Desejo clonar o estudo!



Relatórios de Laudos

3	Relatórios de Laudos	29
3.1	Relatórios	

3. Relatórios de Laudos

3.1 Relatórios

Para visualizar os relatórios dos laudos, basta localizar na parte direita da aplicação, o nome “Relatórios” e clicar com o botão esquerdo do mouse em “Laudos”.



The screenshot shows the 'Relatório de Laudos' (Reports of Findings) interface. At the top, there's a search bar and a user profile icon. Below the title, there's a dropdown menu set to '10'. The main section contains several filter groups: 'Medico' (Todos), 'Modalidade' (Todas), 'Prioridade do Resultado' (Todas), 'Início' (DD/MM/AAAA), 'Status do Exames' (Todos), 'Prioridade do Exame' (Todas), 'Unidade' (Todas), and 'Fim' (DD/MM/AAAA). There are 'Filtrar' and 'PDF' buttons, and a 'Total: R\$ 42,00' label. Below the filters is a table with columns: PACIENTE, MEDICO, MODALIDADE, STATUS, EXAME, RESULTADO, UNIDADE, and PREÇO. The table lists two patients: NATÁLIA SOUZA RODRIGUES and JOÃO DA SILVA NETO.

PACIENTE	MEDICO	MODALIDADE	STATUS	EXAME	RESULTADO	UNIDADE	PREÇO
NATÁLIA SOUZA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(4)	Dr (a). tiago nogueira	MG	Liberado	Urgente	Emergência	Perennity	R\$ 2,00
JOÃO DA SILVA NETO 16/08/1966 (M)(6)	Dr (a). Bruno Silva	XA	Liberado	Emergência	Emergência	Perennity	R\$ 2,00

Na parte principal da página, dentro do campo de “Relatório de Laudos”, temos os botões de “Filtrar” e “PDF”.

This is a close-up of the filter section of the 'Relatório de Laudos' interface. It shows the same set of filters as the screenshot above, including the 'Filtrar' and 'PDF' buttons, and the 'Total: R\$ 42,00' label. The 'Filtrar' button is highlighted with a red border.

Para buscar o(s) relatório(s), basta inserir as informações necessárias dentro dos campos e ir em “Filtrar”, automaticamente o sistema irá retornar para o usuário o laudo de acordo com as informações inseridas.

Relatório de Laudos

10

Medico

Bruno Silva

Modalidade

Todas

Prioridade do Resultado

Todas

Início

DD/MM/AAAA

Fim

DD/MM/AAAA

Filtrar

PDF

Total: R\$ 2.00

PACIENTE

MEDICO

MODALIDADE

STATUS

EXAME

RESULTADO

UNIDADE

PREÇO



JOÃO DA SILVA
NETO
16/08/1966
(M)(6)

Dr (a). Bruno Silva

XA

Liberado

Emergência

Emergência

Perennity

R\$ 2.00

<<

1

>>

Para melhor visualização, o usuário poderá optar pela opção em “PDF”.

Relatório de Laudos

1 / 1

100%

Imprimir

Salvar

Cancelar

HOSPITAL

CNPJ: 26.252.222/0002-22

AV DIAMANTES ESG COM MUCURI, SN QD 2A

ST CONDE DOS ARCOS - Bom Jesus da Lapa - Goiás

(62) 30000 0000

Valor Total

R\$ 2,00

RELATORIO DE LAUDOS

Médico	Status	Paciente	Modalidade	Exame	Resultado	Unidade	Preço
Bruno	Liberado	João da Silva Neto	XA	Emergência	Emergência	Perennity	R\$ 2,00

Salvar

Imprimir

Cancelar

Caso no campo de pesquisa de “Médico” esteja com a opção padrão (Todos), o sistema irá mostrar todos os laudos do paciente.

Filtrar

PDF

Total: R\$ 42,00

PACIENTE	MEDICO	MODALIDADE	STATUS	EXAME	RESULTADO	UNIDADE	PREÇO
 NATÁLIA SOUZA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(4)	Dr (a). tiago nogueira	MG	Liberado	Urgente	Emergência	Perennity	R\$ 2,00
 JOÃO DA SILVA NETO 16/08/1966 (M)(6)	Dr (a). Bruno Silva	XA	Liberado	Emergência	Emergência	Perennity	R\$ 2,00
 JOÃO MANUEL DA SILVA 16/08/1066 (M)(1)	Dr (a). Maria Silva	US	Liberado	Não Urgente	Urgente	Perennity	R\$ 2,00
 BRUNA DA SILVA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(4)	Dr (a). Lucas Nogueira	MG	Liberado	Não Urgente	Emergência	Perennity	R\$ 2,00
 BRUNA DA SILVA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(4)	Dr (a). Lucas Nogueira	MG	Liberado	Emergência	Emergência	Perennity	R\$ 2,00
 NATÁLIA SOUZA RODRIGUES 17/06/1971 (F)(4)	Dr (a). Antônio Lomanto	MG	Liberado	Não Urgente	Não Urgente	Perennity	R\$ 2,00

IV

Configurações

4	Configurações	35
4.1	Configurações de Usuários	
4.2	Configurações de Máscaras	
4.3	Configurações de Empresas	
4.4	Configurações de Precificação	
4.5	Configurações de Temporização	

4. Configurações

4.1 Configurações de Usuários

Para fazer as configurações de usuários como inserir, editar, remover ou desativar basta ir no meu lateral esquerdo da aplicação e localizar dentro do grupo de configurações a palavra “Usuários”.

Após clicar em usuário, o sistema redirecionar para a página principal de configurações de usuários.

Usuários						
+ Adicionar 10 Pesquisar...						
NOME	PERFIL	EMPRESA	STATUS	AÇÕES		
 ANDRÉ GONÇALVES testemedicosolicita@hotmail.com	Médico Solicitante	Hospital	Ativo			
 ANTÔNIO LOMANTO	Administrador	Hospital	Ativo			
 BRENDA FERREIRA teste@teste.com	Médico Laudador	Hospital	Ativo			
 BRUNA SANTOS paloma@teste.com.br	Médico Laudador	Hospital	Ativo			
 BRUNO PIERRE	Médico Laudador	Hospital	Ativo			
 BRUNO SILVA testemedicolaudador@hotmail.com	Médico Laudador	Hospital	Ativo			
 DIEGO ASSUNÇÃO diego@teste.com	Administrador	Hospital	Ativo			
 GUILHERME SOUSA	Administrador	Hospital	Ativo			

Adicionar Usuário

Usuários						
+ Adicionar						
10 Pesquisar...						
NOME	PERFIL	EMPRESA	STATUS	AÇÕES		
 ANDRÉ GONÇALVES testemedicosolicita@hotmail.com	Médico Solicitante	Hospital	Ativo			
 ANTÔNIO LOMANTO	Administrador	Hospital	Ativo			
 BRENDA FERREIRA teste@teste.com	Médico Laudador	Hospital	Ativo			

Para adicionar um usuário, localize dentro do campo o botão de “Adicionar”, após localizado clique com o botão esquerdo do mouse. Após clicar no botão “Adicionar” o sistema redirecionar para a tela de cadastro de usuários.

Cadastro de Usuário

Nome:

Sobrenome:

E-mail:

Perfil:

Administrador

Senha:

Confirme a Senha:

Salvar

Cancelar

Após inserir as informações necessárias, basta ir em “Salvar”.

Editar Usuário

NOME	PERFIL	EMPRESA	STATUS	AÇÕES		
 ANDRÉ GONÇALVES testemedicosolicita@hotmail.com	Médico Solicitante	Hospital	Ativo			

Para editar um usuário, basta localizar na coluna de ações o ícone de edição. Após localizar clique com o botão esquerdo do mouse. Após clicar no botão de editar, o sistema irá redirecionar para a página de edição dos dados dos usuários.

Editar Usuário

Nome:	André	Sobrenome:	Gonçalves
E-mail:	testemedicosolicita@hotmail.com	Perfil:	Médico Solicitante
Empresa:	Hospital	CRM:	123456
UF do CRM:	go	Especialidade:	None
Nova Senha:		Confirme a Nova Senha:	



Solte a imagem da assinatura de usuário aqui ou clique para fazer upload!

Imagem da Assinatura
 Nenhum arquivo escolhido

Para concluir a edição basta alterar os dados desejados e ir em “Salvar”.

Excluir Usuário

 BRUNO SILVA testemedicolaudador@hotmail.com	Médico Laudador	Hospital	Ativo	   
---	-----------------	----------	--------------------	---

Para excluir um usuário basta localizar na coluna de ações o botão de lixeira. Após localizar, clique com o botão esquerdo do mouse. O sistema irá emitir um alerta de exclusão. Para finalizar marque a opção “Desejo excluir o usuário!”.

Tem certeza de que deseja excluir este usuário?
Quando excluído, este usuário e todos os conteúdos relacionados a ele serão perdidos!

☒ Desejo excluir o usuário?

Visualizar Usuário

 BRUNO SANTOS paloma@teste.com.br	Médico Laudador	Hospital	Ativo	   
--	-----------------	----------	--------------------	---

Para visualizar os dados do usuário, basta localizar na coluna de ações o ícone de olho. Após localizar, clique com o botão esquerdo do mouse. O sistema irá abrir um menu lateral do lado direito contendo as informações do usuário.

Visualizar Usuário

Nome Completo

Bruna Santos

Email

paloma@teste.com.br

Perfil

Médico Laudador

Empresa Vinculada

Hospital

CRM

5268

UF do CRM

BA

Assinatura

 Assinatura de Bruna Santos

Cancelar


Desativar Usuário

Para desativar a conta, basta localizar na coluna de ações o botão de desativação no formato de slide. Após clicar com o botão esquerdo do mouse o sistema irá emitir um alerta de desativação de conta.




Para confirmar, marque a caixa de “Confirmar a desativação desta conta!” e clique em “Desativar”.

Pesquisar Usuários

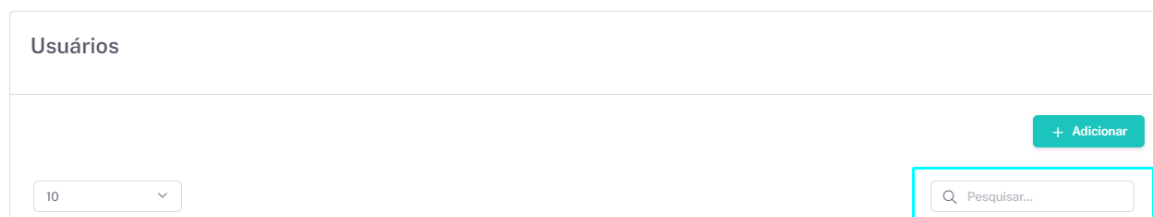

Para pesquisar um usuário, localize no campo de estudo um campo chamado “Pesquisar” juntamente com o ícone de lupa e clique com o botão esquerdo. Para pesquisar insira o nome no campo de pesquisa e tecele o “enter”.

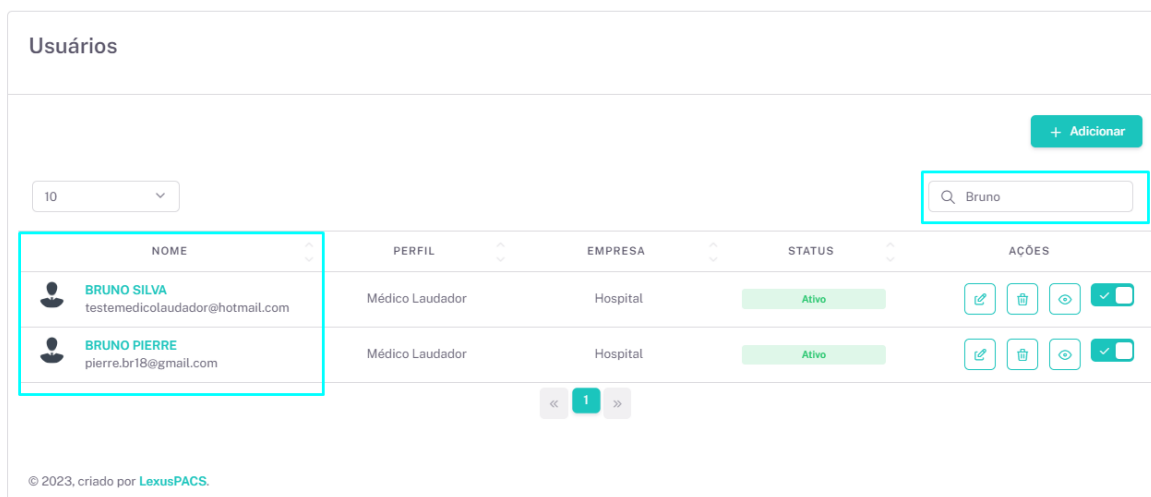

4.2 Configurações de Máscaras

Para visualizar as máscaras existentes no sistema basta localizar no menu lateral esquerdo a opção de “Máscaras”. Após clicar com o botão esquerdo do mouse o sistema redireciona o usuário para a tela principal das máscaras.

Máscaras de Laudos				
+ Adicionar 10 Pesquisar...				
MÁSCARA	CATEGORIA	STATUS	AÇÕES	
ANGIORM DE AORTA ABDOMINAL Máscara Padrão	MR	Ativo		
ANGIORM DE AORTA TORÁCICA Máscara Padrão	MR	Ativo		
ANGIORM DE AORTA TORÁCICA E ABDOMINAL Máscara Padrão	MR	Ativo		
ANGIORM DE ARTERIAL RENAL Máscara Padrão	MR	Ativo		
ANGIORM DE CRÂNIO ARTÉRIAL Máscara Padrão	MR	Ativo		
ANGIORM DE CRÂNIO VENOSA Máscara Padrão	MR	Ativo		
ANGIORM DE MMII Máscara Padrão	MR	Ativo		
ANGIORM DE PESCOÇO Máscara Padrão	MR	Ativo		

Editar Máscara

MÁSCARA	CATEGORIA	STATUS	AÇÕES
ANGIORM DE AORTA ABDOMINAL Máscara Padrão	MR	Ativo	

Para editar uma máscara, basta localizar na coluna de ações o ícone de edição. Após localizar clique com o botão esquerdo do mouse. Após isso edite os campos conforme desejar.

Editar Máscara

Máscara:

ANGIORM DE AORTA ABDOMINAL 2

Categoria:

MR

Descrição:

Sans Serif Normal B I U A X² X₂ H₁ H₂ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

Escreva a descrição deste laudo

Salvar

Cancelar

© 2023 criado por I **exius**PACS

Excluir Máscara

MÁSCARA	CATEGORIA	STATUS	AÇÕES
ANGIORM DE AORTA ABDOMINAL Máscara Padrão	MR	Ativo	

Para excluir uma máscara basta localizar na coluna de ações o botão de lixeira. Após isso confirme a exclusão em “Confirmo a exclusão desta máscara!”.

Tem certeza de que deseja excluir esta máscara?

Quando excluído, todos os dados nela contidos serão apagados!

☒ Confirmo a exclusão desta máscara!

Excluir

Cancelar

Visualizar Máscara

MÁSCARA	CATEGORIA	STATUS	AÇÕES
ANGIORM DE AORTA ABDOMINAL Máscara Padrão	MR	Ativo	

Para visualizar a máscara, basta localizar na coluna de ações o ícone de olho. Após clicar, irá abrir um menu lateral esquerdo contendo as informações da máscara.

Visualizar Máscara

Máscara:

ANGIORM DE AORTA ABDOMINAL

Categoria:

MR

Descrição:

ANGIORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE AORTA ABDOMINAL

Técnica de exame:

Exame realizado através da sequência 3D Fast Gradiente Echo após a injeção endovenosa em bolus do meio de contraste paramagnético (gadolínio).

Análise:

Não há sinais de formação aneurismática, lâmina de dissecação ou estenose na aorta torácica e abdominal.

Tronco celíaco e artéria mesentérica superior pÉrvios, sem sinais de estenose. Cada rim é irrigado por apenas uma artéria hilar principal, ambas pÉrvias.

Artéria mesentérica inferior pÉrvia.

Os maiores diâmetros dos seguintes segmentos vasculares medem:

Transição tÓraco-abdominal aÓrtica: _____ cm.


Aorta abdominal na altura da emergência das artÉrias renais: _____ cm. Segmento infrarenal da aorta abdominal: _____ cm.

ArtÉrias ilÍacas comuns com trajeto e calibre normais, com calibre de _____ cm à direita e _____ cm à esquerda.


Desativar Máscara

MÁSCARA	CATEGORIA	STATUS	AÇÕES
ANGIORM DE AORTA ABDOMINAL Máscara Padrão	MR	Ativo	

Para desativar a máscara, basta localizar na coluna de ações o botão de desativação no formato de slide. Após clicar com o botão esquerdo do mouse o sistema irá emitir um alerta de desativação de máscara. Para confirmar, marque a caixa de “Confirmar a desativação desta máscara!” e clique em “Desativar”.

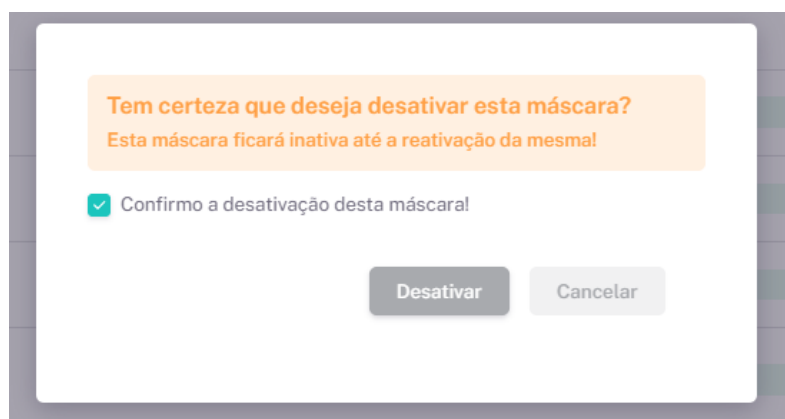

Adicionar Máscara

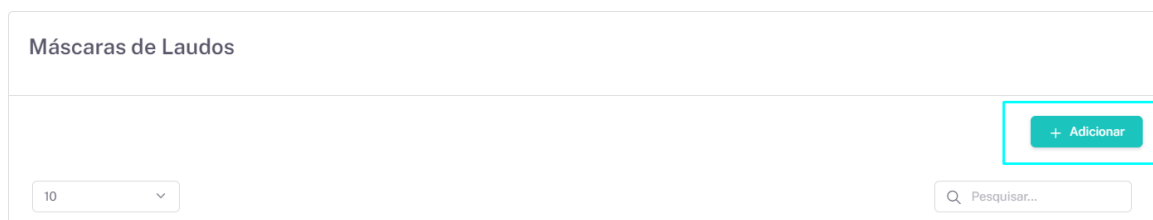

Para adicionar uma máscara, localize dentro do campo o botão de “Adicionar”, após localizado clique com o botão esquerdo do mouse. Após isso, o sistema irá redirecionar o usuário para a página de cadastro de máscara.

O formulário "Cadastro de Máscara" possui os seguintes campos: "Máscara:" com um campo de texto; "Categoria:" com um menu suspenso selecionando "CR"; "Descrição:" com uma barra de formatação rica (incluindo fontes, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento, etc.) e uma área de texto para a descrição. No rodapé, há dois botões: "Salvar" (em verde) e "Cancelar" (em cinza).

Para concluir o cadastro, insira os dados necessários no formulário e vá em “Salvar”.

Pesquisar Máscara

Máscaras de Laudos

10

+ Adicionar

Pesquisar...

Para pesquisar uma máscara, localize no campo de estudo um campo chamado “Pesquisar” juntamente com o ícone de lupa e clique com o botão esquerdo. Para pesquisar insira o nome no campo de pesquisa e tecle o “enter”.

Máscaras de Laudos

10

+ Adicionar

Pesquisar RX DE COLUNA

MÁSCARA	CATEGORIA	STATUS	ações
RX DE COLUNA CERVICAL Máscara Padrão	CR	Ativo	
RX DE COLUNA LOMBAR Máscara Padrão	CR	Ativo	
RX DE COLUNA SACROCOCCÍGEA Máscara Padrão	CR	Ativo	
RX DE COLUNA TORÁCICA Máscara Padrão	CR	Ativo	
RX DE COLUNA TOTAL Máscara Padrão	CR	Ativo	

<<

1

>>

4.3 Configurações de Empresas

Para visualizar as empresas existentes no sistema basta localizar no menu lateral esquerdo a opção de “Empresas”. Após clicar com o botão esquerdo do mouse o sistema redirecionará o usuário para a tela principal de “Empresas”.

Empresas			
10 ▾		Pesquisar...	
NOME	CIDADE	STATUS	AÇÕES
HOSPITAL 25.252.222/2222-22	Bom Jesus da Lapa	Ativo	 
<< >>			

Editar Empresa

Empresas			
10 ▾		Pesquisar...	
NOME	CIDADE	STATUS	AÇÕES
HOSPITAL 25.252.222/2222-22	Bom Jesus da Lapa	Ativo	 
<< >>			

Para editar os dados de uma empresa, basta localizar na coluna de ações o ícone de edição. Após localizar clique com o botão esquerdo do mouse. Após o clique, o sistema irá abrir a página de edição de dados de uma empresa.

Editar Empresa: Hospital

Razão Social:	Hospital	Nome Fantasia:	Hospital
Inscrição Estadual:	122.525.222/2244	CNPJ:	25.252.222/2222-22
CNES:	5419662	CEP:	47600-000
Logradouro:	AV DIAMANTES ESQ COM MUCURI	Complemento:	QD 2A
Número:	S/N	Bairro:	ST CONDE DOS ARCOS
Estado:	Goiás ▾	Cidade:	Bom Jesus da Lapa ▾



Solte a imagem da logo marca aqui ou clique para fazer upload!

Após ter editado os dados, clique em “Salvar”.

Visualizar Empresa

Empresas			
10	Pesquisar...		
NOME	CIDADE	STATUS	AÇÕES
HOSPITAL 25.252.222/2222-22	Bom Jesus da Lapa	Ativo	 
<< >>			

Para visualizar os dados do usuário, basta localizar na coluna de ações o ícone de olho. Após localizar, clique com o botão esquerdo do mouse. O sistema irá abrir um menu lateral do lado direito contendo as informações da empresa.

Visualizar Empresa

Nome Fantasia:

Hospital

Razão Social:

Hospital

Inscrição Estadual:

122.525.222/2244

CNPJ:

25.252.222/2222-22

CNES:

5419662

CEP:

47.600-000

Cidade:

Bom Jesus da Lapa

Bairro:

ST CONDE DOS ARCOS

Logo:

Cancelar

Pesquisar Empresa

Empresas

10

Pesquisar...

NOME	CIDADE	STATUS	AÇÕES
HOSPITAL 25.252.222/2222-22	Bom Jesus da Lapa	Ativo	

« »

Para pesquisar uma máscara, localize no campo de estudo um campo chamado “Pesquisar” juntamente com o ícone de lupa e clique com o botão esquerdo. Para pesquisar insira o nome no campo de pesquisa e tecle o “enter”.

4.4 Configurações de Precificação

Para alterar a precificação no sistema basta localizar no menu lateral esquerdo a opção de “Precificação”. Após clicar com o botão esquerdo do mouse o sistema redireciona o usuário para a tela principal de “Precificação”.

Precificação de Laudos

	NÃO URGENTE	POUCO URGENTE	URGENTE	MUITO URGENTE	EMERGÊNCIA
CR	R\$ 10,00	R\$ 2,00	R\$ 5,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
CT	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
DO	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
DX	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
ES	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
MG	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
MR	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
NM	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
OT	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
PT	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
RF	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
RT	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
SC	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
US	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
XA	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00

Salvar
Cancelar

Para alterar, basta clicar na máscara escolhida, trocar o valor e ir em “Salvar”.

Precificação de Laudos

	NÃO URGENTE	POUCO URGENTE	URGENTE	MUITO URGENTE	EMERGÊNCIA
CR	R\$ 10,00	R\$ 2,00	R\$ 5,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
CT	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
DO	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
DX	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
ES	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
MG	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
MR	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
NM	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
OT	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
PT	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
RF	R\$ 5,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
RT	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
SC	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
US	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00
XA	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00

4.5 Configurações de Temporização

Para alterar a temporização dos laudos no sistema basta localizar no menu lateral esquerdo a opção de “Temporização”. Após clicar com o botão esquerdo do mouse o sistema redirecionará o usuário para a tela principal de “Temporização”.

Temporização de Laudos

	NÃO URGENTE	POUCO URGENTE	URGENTE	MUITO URGENTE	EMERGÊNCIA
CR	02:00:00	02:00:00	03:00:00	02:00:00	02:50:00
CT	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
DO	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
DX	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
ES	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
MG	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
MR	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
NM	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
OT	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
PT	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
RF	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
RT	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
SC	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
US	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
XA	04:44:44	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00

Para alterar, basta clicar na máscara escolhida, trocar o valor e ir em “Salvar”.

Temporização de Laudos

	NÃO URGENTE	POUCO URGENTE	URGENTE	MUITO URGENTE	EMERGÊNCIA
CR	02:00:00	02:00:00	03:00:00	02:00:00	02:50:00
CT	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
DO	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
DX	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
ES	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
MG	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
MR	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
NM	02:00:50	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
OT	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
PT	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
RF	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
RT	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
SC	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
US	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00
XA	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00	02:00:00

Salvar

Cancelar



Administração

5	Administração	53
5.1	Atribuição de Perfis de Usuários	
		55

5. Administração

5.1 Atribuição de Perfis de Usuários

Para alterar a atribuição de perfis no sistema basta localizar no menu lateral esquerdo a opção de “Atribuições”. Após clicar com o botão direito do mouse o sistema redirecionará o usuário para a tela principal de “Atribuições”.

Atribuições de Perfis de Usuários						
PERMISSÃO	MÉDICO LAUDADOR	MÉDICO SOLICITANTE	RECEPÇÃO	ENFERMAGEM	RADIOLOGIA	
Marcar/Desmarcar Tudo:	☐	☐	☐	☐	☐	
Menu Estudos:						
1-Editar	☐	☐	☒	☐	☒	
2-Apagar	☐	☐	☐	☐	☐	
3-Clonar Estudo	☒	☐	☒	☐	☒	
4-Visualizar Estudo	☒	☒	☒	☒	☒	
5-Baixar Estudo	☒	☒	☒	☐	☐	
6-PDF(Laudo)	☒	☒	☒	☒	☒	
7-Protocolo	☐	☐	☒	☒	☒	
8-Laudar	☒	☐	☐	☐	☐	
9-Prioridade	☐	☐	☒	☒	☒	
10-Status	☒	☐	☐	☐	☐	
11-Anamnese	☒	☐	☐	☒	☒	
12-Anexos	☒	☐	☒	☒	☒	
13-Áudio	☒	☐	☐	☐	☐	
14-Cadastrar Exame	☐	☐	☒	☒	☒	
Menu Relatórios:						
Ver Relatórios	☐	☐	☐	☐	☐	
15-Filtrar Relatórios	☐	☐	☐	☐	☐	

Para alterar, basta marcar o checklist de cada perfil e ir em “Salvar”.

Atribuições de Perfis de Usuários

PERMISSÃO	MÉDICO LAUDADOR	MÉDICO SOLICITANTE	RECEPÇÃO	ENFERMAGEM	RADIOLOGIA
Marcar/Desmarcar Tudo:	☐	☐	☐	☐	☐
Menu Estudos:					
1-Editar	☒	☐	☒	☐	☒
2-Apagar	☐	☐	☐	☐	☐
3-Clonar Estudo	☒	☐	☒	☐	☒
4-Visualizar Estudo	☒	☒	☒	☒	☒
5-Baixar Estudo	☒	☒	☒	☐	☐
6-PDF(Laudo)	☒	☒	☒	☒	☒
7-Protocolo	☐	☐	☒	☒	☒
8-Laudar	☒	☐	☐	☐	☐
9-Prioridade	☐	☐	☒	☒	☒
10-Status	☒	☐	☐	☐	☐
11-Anamnese	☒	☐	☐	☒	☒
12-Anexos	☒	☐	☒	☒	☒
13-Áudio	☒	☐	☐	☐	☐
14-Cadastrar Exame	☐	☐	☒	☒	☒
Menu Relatórios:					
Ver Relatórios	☐	☐	☐	☐	☐
15-Filtrar Relatórios	☐	☐	☐	☐	☐




14-Cadastrar Exame	☐	☐	☒	☒	☒
Menu Relatórios:					
Ver Relatórios	☐	☐	☐	☐	☐
15-Filtrar Relatórios	☐	☐	☐	☐	☐
16-Exportar Relatórios	☐	☐	☐	☐	☐
Menu Configurações:					
Ver Configurações	☒	☐	☐	☐	☐
Ver Máscaras	☒	☐	☐	☐	☐
17-Nova Máscara	☒	☒	☐	☒	☒
18-Editar Máscara	☒	☐	☐	☐	☐
19-Excluir Máscara	☒	☐	☒	☐	☐
20-Visualizar Máscara	☒	☒	☐	☐	☐
21-Ativar/Desativar Máscara	☒	☐	☐	☐	☐
Ver Empresas	☐	☐	☐	☐	☐
22-Editar Empresa	☐	☐	☐	☐	☐
23-Visualizar Empresa	☐	☐	☐	☐	☐
Ver Precificação	☐	☐	☐	☐	☐
24-Editar Precificação Exames	☐	☐	☐	☐	☐
Ver Temporização	☐	☐	☐	☐	☐
25-Editar Temporização Exames	☐	☐	☐	☐	☐

Para maiores informações, entre em contato com o nosso suporte técnico.

www.lexuspacs.com.br

(62) 99325-7869 / (62) 99835-7148

atendimento@lexuspacs.com.br

Índice

A

Atribuição de Perfis de Usuários	53
Autenticação de Usuário	9
Ações	14

C

Configurações de Empresas	44
Configurações de Máscaras	40
Configurações de Precificação	47
Configurações de Temporização	48
Configurações de Usuários	35

E

Estudos	13
---------------	----

P

Página Principal	13
------------------------	----

R

Relatórios	29
------------------	----



Portal de Resultados

Manual de Usuário





SOLUÇÕES EM IMAGINOLOGIA

Fundada em 2017, a **Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços** atua no segmento de tecnologia da informação radiológica e tem-se consolidada como uma empresa de alta tecnologia, aliando inovação tecnológica à radiologia médica. Atualmente, nossa empresa oferece as melhores soluções com o melhor custo benefício do mercado. Nosso foco é atender as necessidades de cada organização, adequando soluções tecnológicas aos objetivos de cada negócio.

A **Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços** possui ferramentas integrativas que oferecem soluções de gestão e diagnóstico radiológico de forma eficiente e eficaz capaz de suprir as expectativas dos nossos clientes.



Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços LTDA

Rua 22 431 Quadrah 10 Lote 24 Box C-78

Setor Oeste - Goiânia - Goiás

CNPJ: 46.857.972/0001-06

atendimento@lexuspacs.com.br

Telefone: (62) 99618-9034

Sumário

I	Login no Sistema	
1	Login no Sistema	9
1.1	Credenciais do Paciente	9
II	Resultados	
2	Resultados	13
2.1	Resultados	13
	Índice	17




Login no Sistema

1	Login no Sistema	9
1.1	Credenciais do Paciente	

1. Login no Sistema

1.1 Credenciais do Paciente

Para acessar a página de resultados da LexusPacs, basta inserir no endereço de pesquisa o seguinte link: https://portal.lexuspacs.com.br/accounts/logar_resultado/.

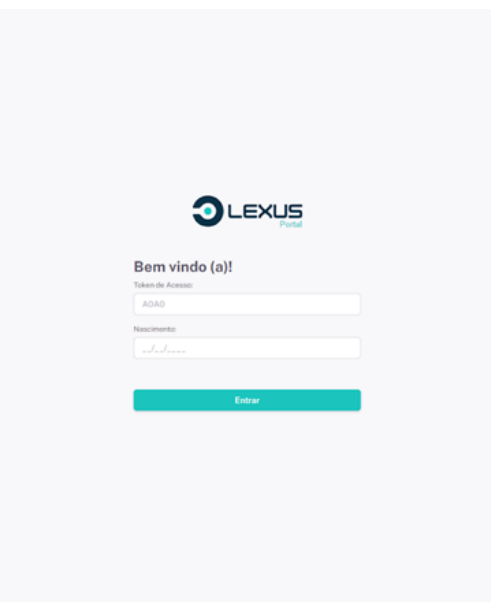

Após isso, insira no campo de “Token de Acesso”, o token disponibilizado no protocolo expedido pelo médico e a data de nascimento do paciente.




Bem vindo (a)!

Token de Acesso:

Nascimento:

Entrar

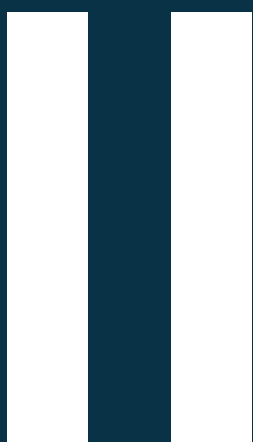

Resultados

2	Resultados	13
2.1	Resultados	
		17

2. Resultados

2.1 Resultados


Após ter logado com as credenciais, o sistema redireciona o usuário para a página principal de resultados.

Resultado do Exame				
Login realizado com sucesso!				
PACIENTE	DATA	DESCRIÇÃO	MEDICO	AÇÕES
 Bruna da Silva Rodrigues 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011	Mammography	Dr(a) Lucas Nogueira	 
 				

Na coluna de ações terá dois botões: o de PDF e o de visualizar o resultado.

Resultado do Exame				
Login realizado com sucesso!				
PACIENTE	DATA	DESCRIÇÃO	MEDICO	AÇÕES
 Bruna da Silva Rodrigues 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011	Mammography	Dr(a) Lucas Nogueira	 
 				

Para visualizar as imagens do resultado, basta localizar o ícone com o formato de olho e clicar com o botão esquerdo do mouse. Após isso o sistema irá abrir em outra página o nosso visualizador de imagens, o DICOM.

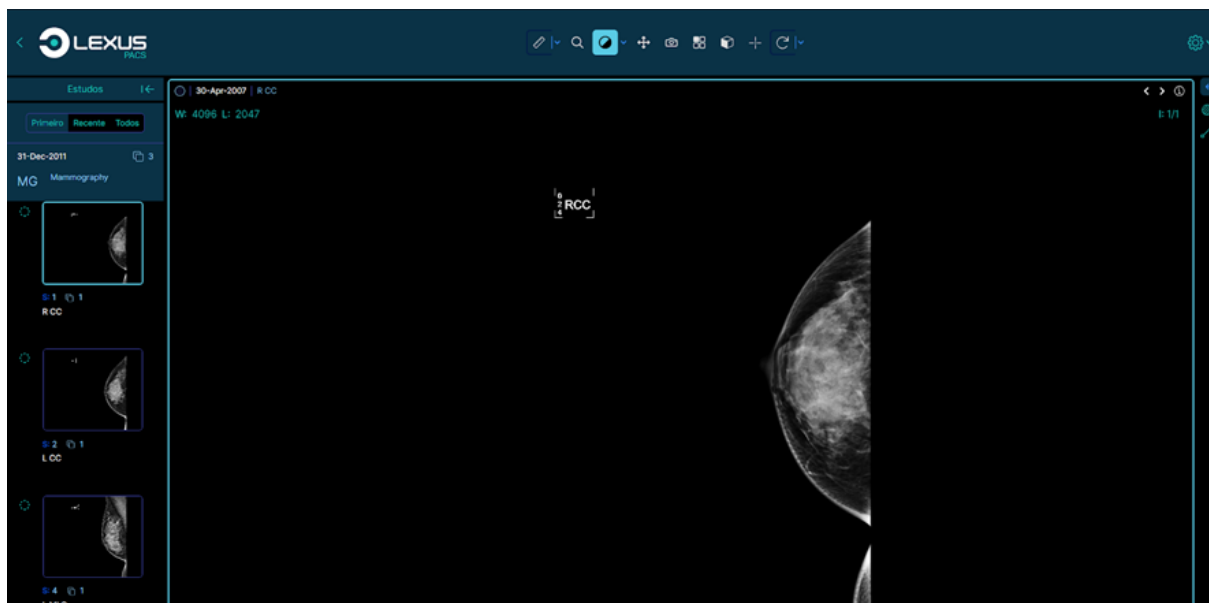

Para ver o laudo médico, localize na coluna de ações o ícone de PDF. Após isso clique com o botão esquerdo do mouse.

Resultado do Exame

Login realizado com sucesso!

PACIENTE	DATA	DESCRIÇÃO	MEDICO	AÇÕES
 Bruna da Silva Rodrigues 17/06/1971 (F)(MG)(4)	31/12/2011	Mammography	Dr(a) Lucas Nogueira	 

<<

>>

Após isso, o sistema irá redirecionar para o leitor de PDF.

	HOSPITAL CNPJ: 25.252.222/2222-22 AV DIAMANTES ESQ COM MUCURI, S/N QD 2A ST CONDE DOS ARCOS - Bom Jesus da Lapa - Goiás (00) 00000 0000	 Código Validador: ff8f19
MAMMOGRAPHY (MG)		
Nome: Bruna da Silva Rodrigues Sexo: Feminino		Data de Nascimento: 17/06/1971 (52) anos Data do Exame: 31/12/2011
RADIOGRAFIA DE TÓRAX Técnica de exame: Estudo de radiografia Obtidas incidências AP ou PA e P do Tórax. Análise: Transparência normal dos campos pleuro-pulmonares. Cúpulas e seios diafragmáticos livres. Área cardíaca dentro dos limites da normalidade. Arcabouço ósseo preservado. Impressão diagnóstica: Avaliação por radiografia sem alterações significativas. Observação: TESTE		
	Dr (a). Lucas Nogueira CRM: 1234/BA Assinado eletronicamente em 12,12,2023 às 21:13:09	
Para validar este documento acesse: https://portal.lexuspacs.com.br/verificar/taudo/186 e informe o código: ff8f19		

Para maiores informações, entre em contato com o nosso suporte técnico.

www.lexuspacs.com.br

(62) 99325-7869 / (62) 99835-7148

atendimento@lexuspacs.com.br

Índice

C

Credenciais do Paciente.....9

R

Resultados 13



Roteador DICOM

Manual de Usuário





SOLUÇÕES EM IMAGINOLOGIA

Fundada em 2017, a **Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços** atua no segmento de tecnologia da informação radiológica e tem-se consolidada como uma empresa de alta tecnologia, aliando inovação tecnológica à radiologia médica. Atualmente, nossa empresa oferece as melhores soluções com o melhor custo benefício do mercado. Nosso foco é atender as necessidades de cada organização, adequando soluções tecnológicas aos objetivos de cada negócio.

A **Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços** possui ferramentas integrativas que oferecem soluções de gestão e diagnóstico radiológico de forma eficiente e eficaz capaz de suprir as expectativas dos nossos clientes.



Lexus Soluções Tecnológicas e Serviços LTDA

Rua 22 431 Quadrah 10 Lote 24 Box C-78

Setor Oeste - Goiânia - Goiás

CNPJ: 46.857.972/0001-06

atendimento@lexuspacs.com.br

Telefone: (62) 99618-9034

Sumário

I	Instalação	
1	Instalação	9
1.1	Passo a Passo da Instalação Roteador Dicom	9
	Índice	15




Instalação

1	Instalação	9
1.1	Passo a Passo da Instalação Roteador Dicom	
		15


1. Instalação

1.1 Passo a Passo da Instalação Roteador Dicom

Para fazer a instalação do nosso software em sua máquina, primeiro baixe o arquivo de instalação “Instalador Lexus Pacs.exe”.

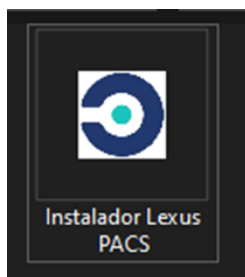

Após executar o arquivo, digite a senha fornecida pelo nosso suporte.

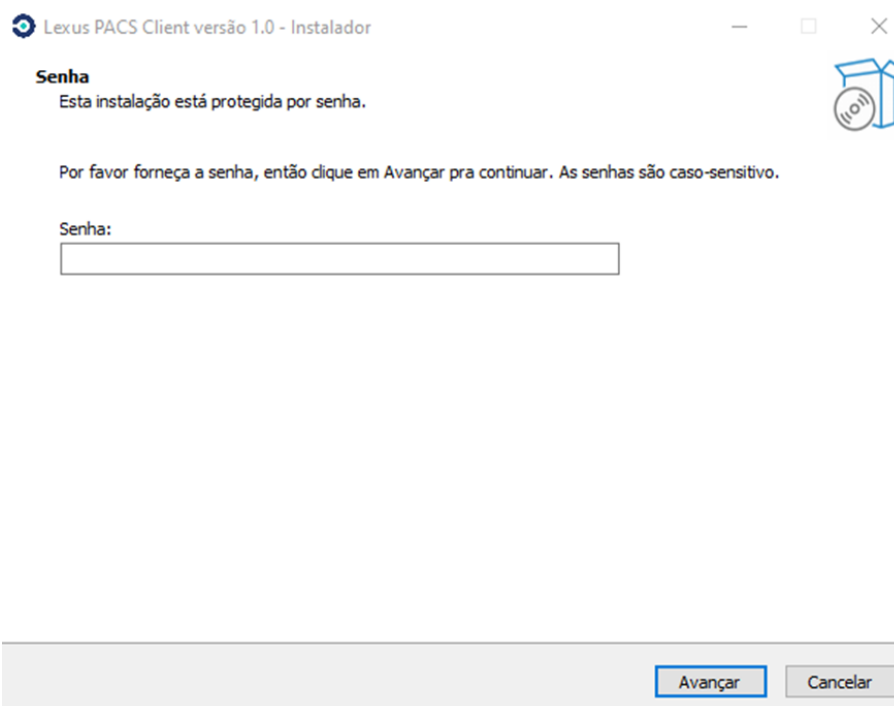

Lexus PACS Client versão 1.0 - Instalador


Senha
Esta instalação está protegida por senha.

Por favor forneça a senha, então clique em Avançar pra continuar. As senhas são caso-sensitivo.


Senha:

Avançar Cancelar


Após inserir a senha clique em “Avançar”.

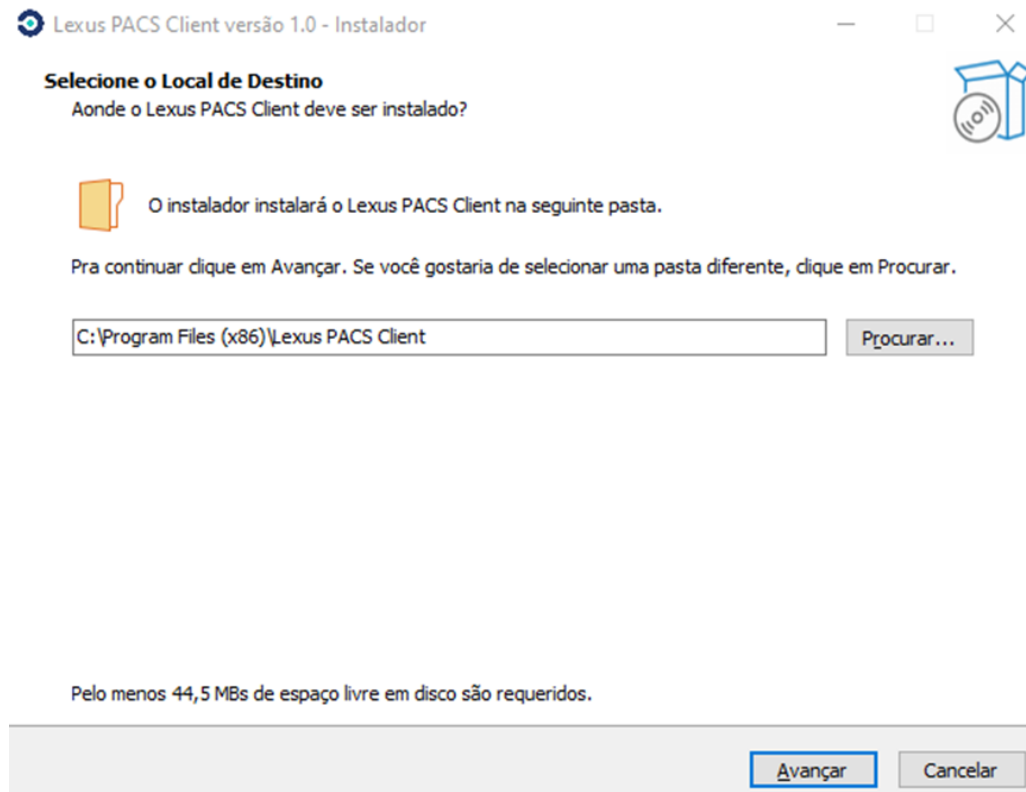


A próxima tela de instalação irá indicar onde os arquivos do sistema será instalado, por padrão a partição que irá conter os arquivos é a C:

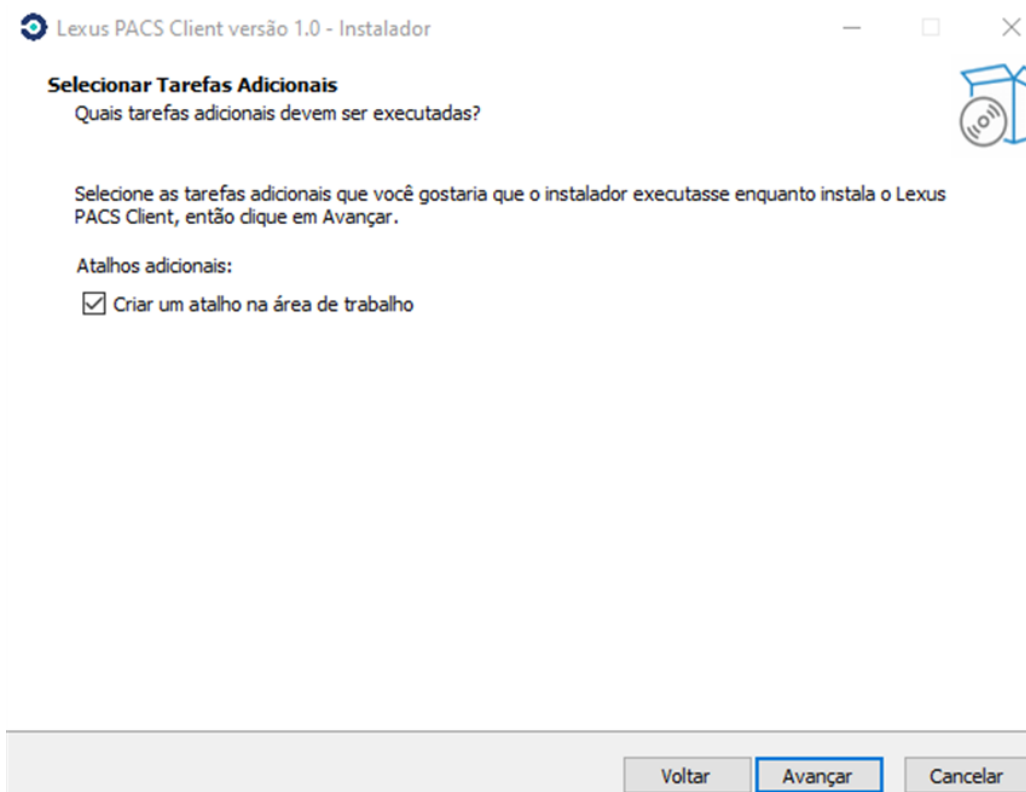


Na terceira tela de instalação, o usuário terá a opção de criar um atalho na área de trabalho. É recomendável que deixe essa opção marcada para futuramente nos auxiliar na configuração do roteador.

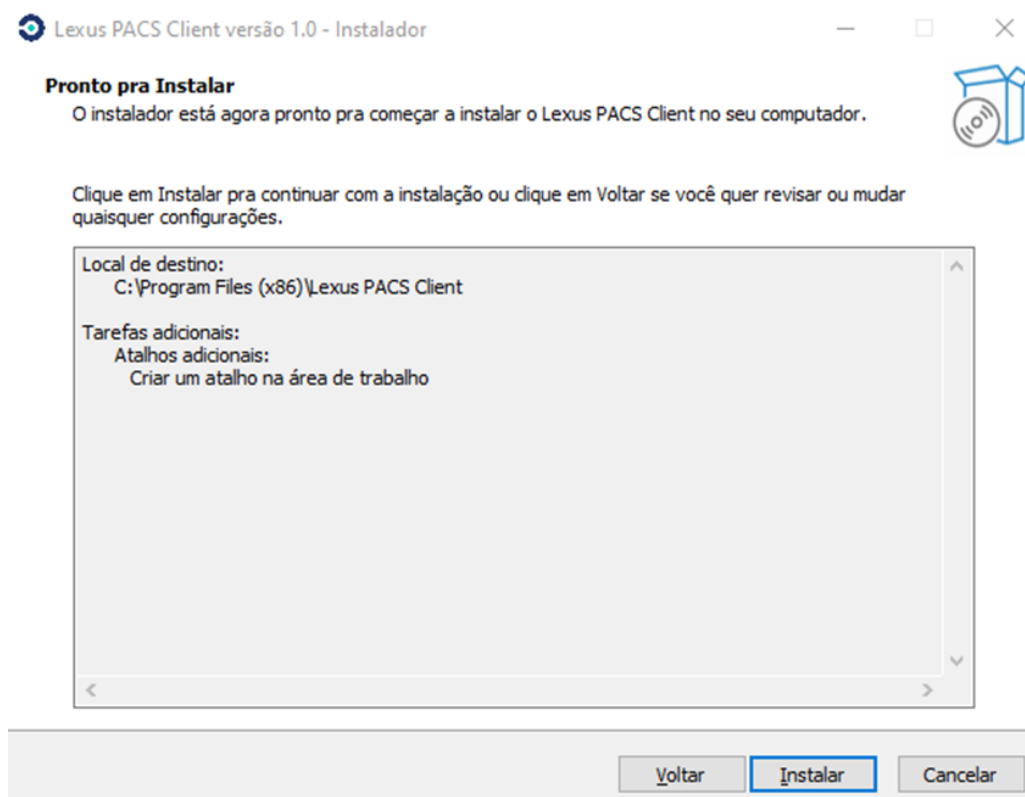


Na quarta tela de instalação, clique em “Instalar”.

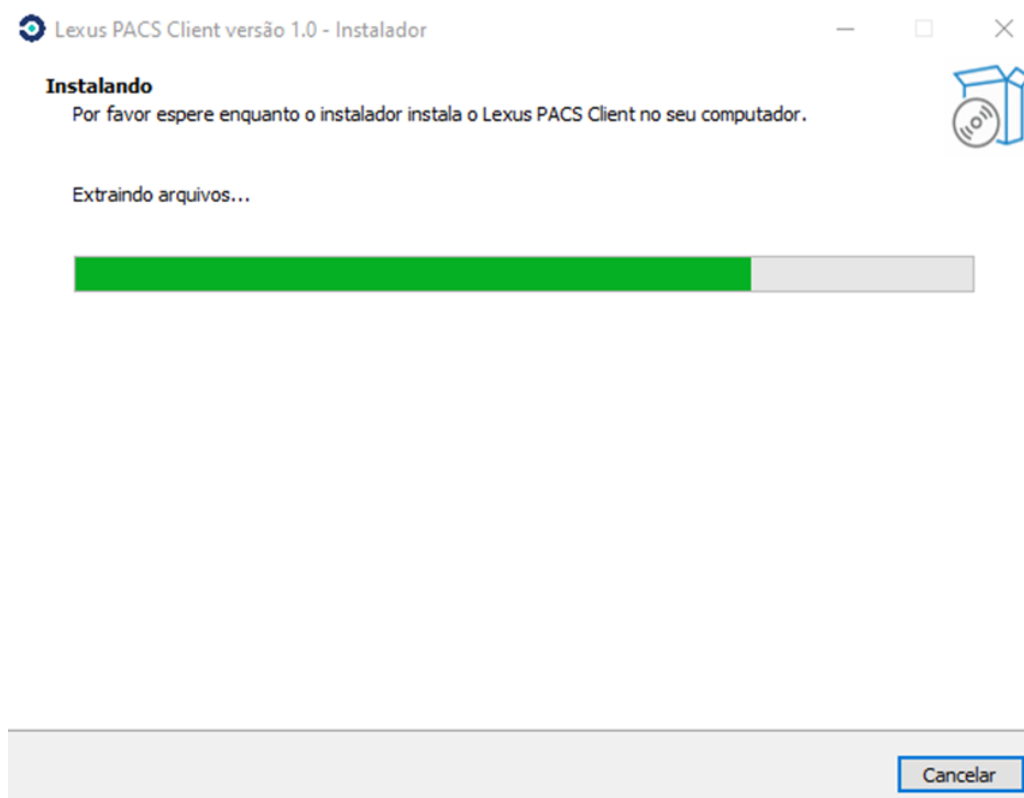

Na quinta tela aguarde a extração dos arquivos.

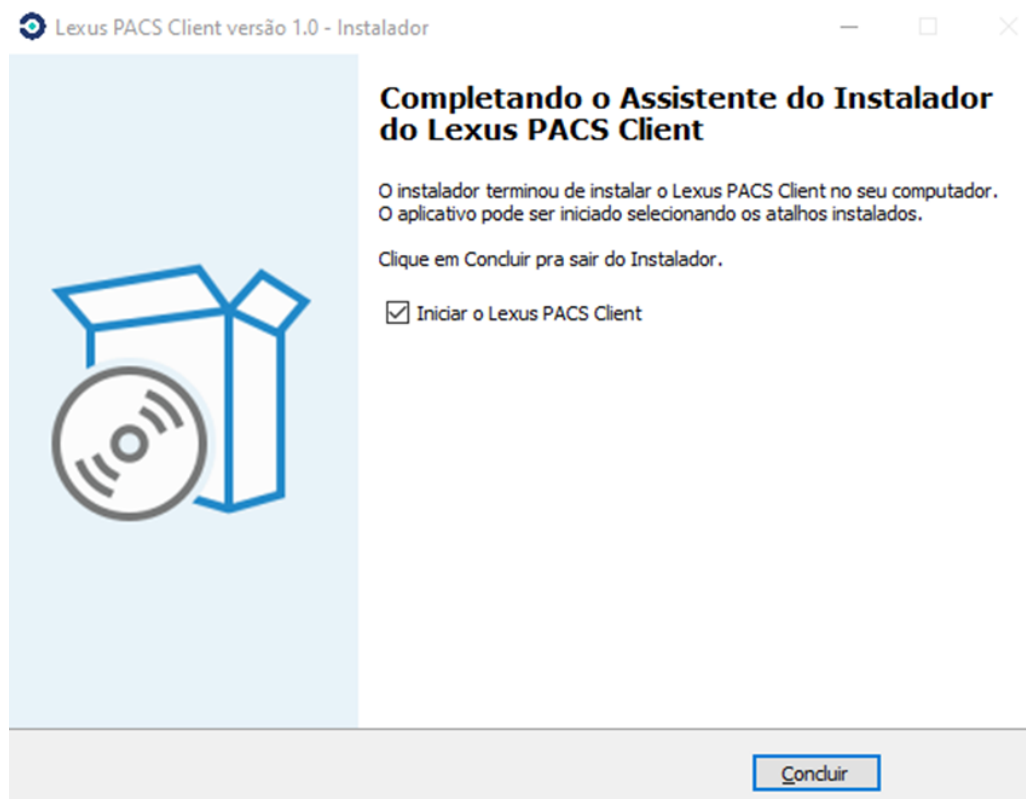


Na última desmarque a opção “Iniciar o Lexus PACS Client”, pois se estiver marcada e clicar em “Concluir”, ocorrerá um erro porque o roteador não está configurado ainda.

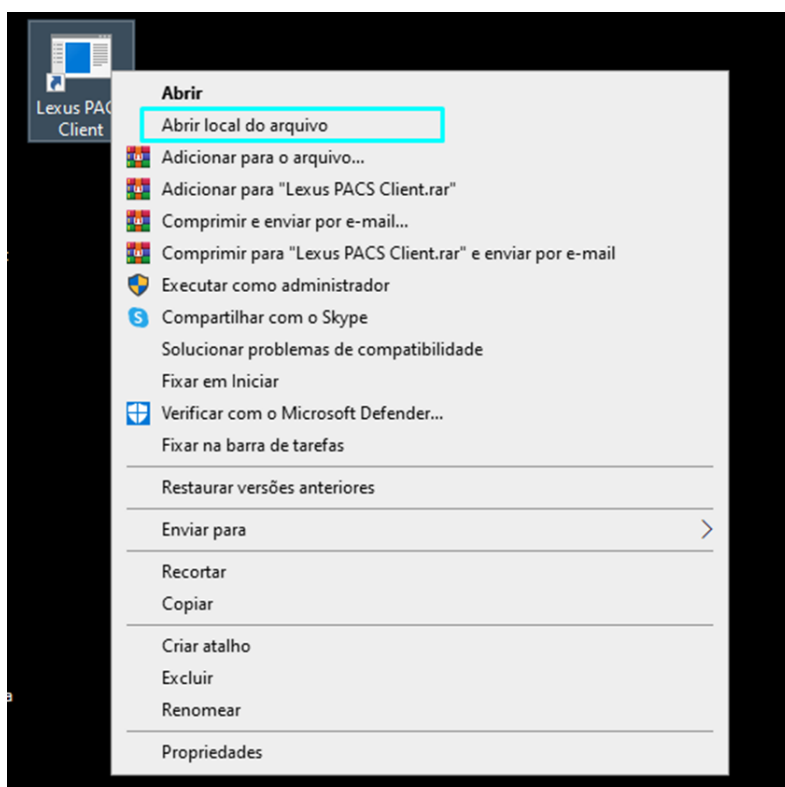

Após a instalação procure na área de trabalho o ícone da LexusPacs e clique com o botão direito do mouse. Clique na opção de “Abrir local do arquivo”.

lib	24/12/2023 00:50	Pasta de arquivos	
configs	13/07/2023 16:24	Documento de Te...	1 KB
log	13/07/2023 21:02	Documento de Te...	37 KB
python3.dll	17/05/2022 16:46	Extensão de aplica...	60 KB
python39.dll	17/05/2022 16:46	Extensão de aplica...	4.421 KB
README	13/07/2023 13:24	Documento de Te...	1 KB
servidor_pacs	13/07/2023 11:43	Aplicativo	17 KB
status_servidor_remoto	14/07/2023 00:50	Documento de Te...	1 KB
unins000.dat	24/12/2023 00:50	Arquivo DAT	436 KB
unins000	24/12/2023 00:49	Aplicativo	3.227 KB

Após ter clicado procure o arquivo com extensão “.txt” chamado de “configs”, e clique duas vezes com o botão direito.

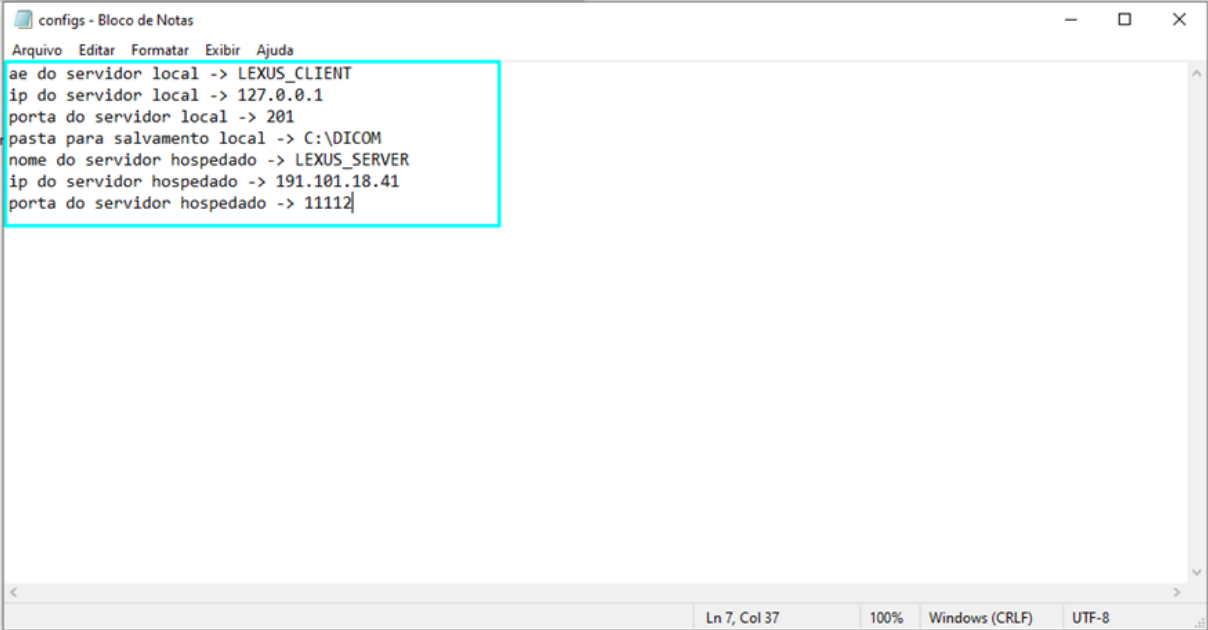


```
configs - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
ae do servidor local -> LEXUS_CLIENT
ip do servidor local -> 127.0.0.1
porta do servidor local -> 201
pasta para salvamento local -> C:\DICOM
nome do servidor hospedado -> LEXUS_SERVER
ip do servidor hospedado -> 191.101.18.41
porta do servidor hospedado -> 11112
```

Ln 7, Col 37 100% Windows (CRLF) UTF-8

Altere os IP do roteador, do servidor remoto e da máquina que está sendo instalado e a porta.

lib	24/12/2023 00:50	Pasta de arquivos	
configs	13/07/2023 16:24	Documento de Te...	1 KB
log	13/07/2023 21:02	Documento de Te...	37 KB
python3.dll	17/05/2022 16:46	Extensão de aplica...	60 KB
python39.dll	17/05/2022 16:46	Extensão de aplica...	4.421 KB
README	13/07/2023 13:24	Documento de Te...	1 KB
servidor_pacs	13/07/2023 11:43	Aplicativo	17 KB
status_servidor_remoto	14/07/2023 00:50	Documento de Te...	1 KB
unins000.dat	24/12/2023 00:50	Arquivo DAT	436 KB
unins000	24/12/2023 00:49	Aplicativo	3.227 KB

Para abrir as configurações do servidor, procure um arquivo chamado de “README” e clique duas vezes com o botão direito do mouse.

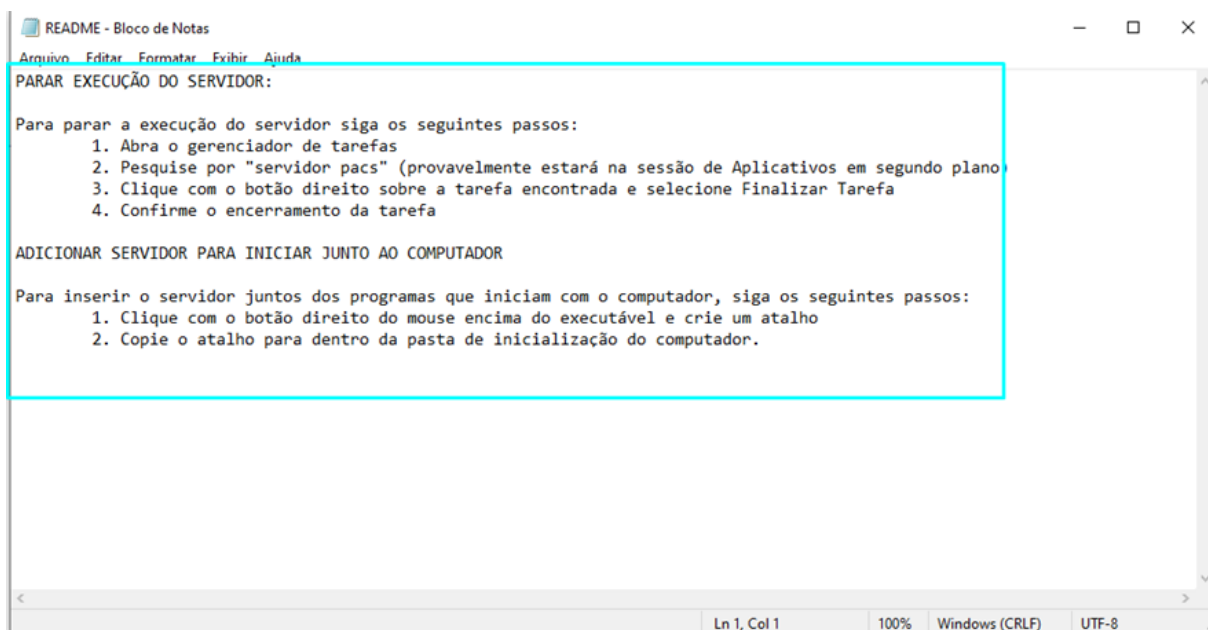

OBS: O técnico que irá realizar a instalação, deverá liberar as portas no firewall da máquina.

Para maiores informações, entre em contato com o nosso suporte técnico.

www.lexuspacs.com.br

(62) 99325-7869 / (62) 99835-7148

atendimento@lexuspacs.com.br

Índice

P

Passo a Passo da Instalação Roteador Dicom . . . 9